



КАТАЛОГ

Российский производитель дезинфицирующих средств



20 ЛЕТ
на рынке



Быстрая доставка



Контроль выпускаемой продукции



Доступность выбора



Собственная лаборатория



Высокое качество



Полная поддержка клиента



Широкий ассортимент



Безопасность

Журналы контроля



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
регистрации температуры
в холодильном оборудовании

Наименование учреждения: _____

Освоение: СП 3.3680.21

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
регистрации и контроля
ультрафиолетовой бактерицидной установки

Наименование учреждения: _____

Освоение: Р 3.5.1.4025-24

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов воздушного, парового
(автоклава)

Наименование учреждения: _____

Форма: № 257/у
Утверждено Приказом Минздрава СССР
№ 1030 от 04.10.1980 г.

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
контроля концентраций
рабочих растворов дезинфицирующих
и стерилизующих средств

Наименование учреждения: _____

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
учёта качества предстерилизационной обработки

Наименование учреждения: _____

Форма: № 366/у
Утверждено Приказом Минздрава СССР
№ 1030 от 04.10.1980 г.

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Дезнэт®
К здоровью
через гигиену

ЖУРНАЛ
учёта проведения генеральных
уборок

Наименование учреждения: _____

Начат: «___» _____ 20__ г.
Окончен: «___» _____ 20__ г.



Гигиеническая обработка кожных покровов

Бэйбилайф_____	6
Бэйбисофт_____	7
Дезилайт_____	8



Дезинфицирующее жидкое мыло

Дезисофт® Лайт_____	9
Дезисофт®_____	10
Дезикварт®_____	11
Тетрасофт®_____	12
Изисофт_____	13



Уход за кожей

Манидерм® шапочки/рукавицы_____	14
Манидерм крем_____	15
Манидерм® Протект_____	16
СоинсБоди (SoinsBody)_____	17



Дезинфекция кожных покровов

Экстрасептик_____	18
Дезманол Пур_____	19
Оптидез_____	20
Дезиптол® Ультра_____	22
Стерихэнд плюс_____	23
СЕПТОДЕРМ ХАУТ_____	24
СЕПТОДЕРМ ХЭНДЕ_____	25
Дезиптол_____	26
Дезиптол гель_____	27
Стерихэнд_____	28
Стерихэнд окрашенный_____	29



Экспресс-дезинфекция поверхностей и оборудования

Экстрасептик_____	18
Оптидез_____	20
Дезиптол® Ультра_____	22
Дезиптол_____	26
Глиактив_____	30
АльфаХлор_____	31
Пероксидез® SW_____	32
Оптидез® ИЗО_____	34



Обработка поверхностей

Пероксидез® Next_____	35
Аминосепт®_____	36
Аминосепт® Гранди_____	37
Дезминол_____	38
Дезиталь®_____	39
Пероксидез® Актив_____	40
Пероксидез® Клинер_____	41
Пероксидез_____	42
Дезитабс_____	43



Влажные салфетки

Экстрасептик	18
Оптидез	21
Пероксидез® SW	32
Оптидез® ИЗО	34
КЛИНИСЕПТ салфетки	44
Дезивайпс®	45
Дезивайпс-И	46
Дезивайпс® Элит	47



Диспенсерные системы

Медвайпс/Деско Вайпс/Эко Вайпс	48
Медвайпс салфетки	49
Ван систем бэйсик	50



Очистка и дезинфекция

Пероксидез® Next	35
Аминосепт®	36
Аминосепт® Гранди	37
Дезминол	38
Дезиталь®	39
Инстру Плюс	51
ДезЭнзим	52
ДезЭнзим® Multi	53
ДезЭнзим SW	54
Перфектан Нью	56
ПЕРФЕКТАН ТБ	57



Индикация биопленок

БиоФайндер (BioFinder)	55
------------------------	----



ДВУ и стерилизация

Пероксидез® SW	33
Пероксидез® Next	35
Пероксидез® Актив	40
Дезиталь Эндо	58
ОФАДЕЗ	59
Пероксидез® НУК	60
Пероксидез® Лайт	61
ДЕСКОТОН 2% ГДА	62
ДЕСКОТОН ЭКСТРА	63
Перфектан Актив	64
Дезиптол® ИЗО	65



Обработка слюноотсосов

Пероксидез® Орто	66
ДЕСКОСАК	67
Дескосук Клинер	68



Обработка стоматологических инструментов

Аминосепт® Денталь	69
ДЕСКО ДРИЛЛЬ	70
Орэндж Солвент	71

БЭЙБИЛАЙФ

ДЕТСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Гигиеническая обработка кожных покровов:

- гигиеническая обработка нежной и чувствительной детской кожи;
- гигиеническая обработка кожных покровов медицинского персонала с особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожей;
- профилактическая обработка предметов ухода за больными и средств личной гигиены, дезинфекция и мытье посуды.

Состав:

Деионизированная вода, натрия лауретсульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, глицерин, экстракт календулы, натрия хлорид, микрокер ИТ, лимонная кислота, парфюмерная композиция.



Артикул: БА-05-Д

БА-1-Д



Фасовка: 500 мл

В упаковке: 10 шт.



1 л

10 шт.

БЭЙБИСОФТ

ДЕТСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Гигиеническая обработка кожных покровов:

- гигиеническая обработка кожи детских рук;
- гигиеническая обработка кожных покровов медицинского персонала с особо чувствительной кожей;
- гигиеническая обработка кожных покровов детей с первых дней жизни;
- в качестве средства для интимной гигиены.

Состав:

Деионизированная вода, натрия кокосульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, пантенол, масло макадамии, натрия хлорид, парфюмерная композиция, лимонная кислота, катон CG.

Артикул: БС-05-Д

БС-1-Д



Фасовка:

500 мл

1 л

В упаковке:

10 шт.

10 шт.

ДЕЗИЛАЙТ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Гигиеническая обработка кожных покровов:

- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- гигиеническая обработка рук после посещения мест массового скопления и длительного пребывания людей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов в быту.

Состав:

Деионизированная вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, натрия хлорид, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлоризотиазолинон, краситель, отдушка.



Артикул: ДЛ-05-Д



Фасовка: 500 мл

В упаковке: 10 шт.

ДЛ-1



1 л

10 шт.

ДЛ-1-Д



1 л

10 шт.

ДЛ-5



5 л

4 шт.

ДЛ-5-Э



5 л

4 шт.

ДЕЗИСОФТ® ЛАЙТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Дезинфицирующее жидкое мыло:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов при уходе за больными;
- профилактическая обработка рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа;
- санитарная обработка кожных покровов;
- профилактическая обработка предметов ухода за больными, средств личной гигиены.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных (включая возбудителей кишечных инфекций, ИСМП) бактерий, вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Деионизированная вода, хлоргексидина биглюконат (1,0%), ПАВ, функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Артикул: ДСЛ-1



Фасовка: 1 л

В упаковке: 10 шт.

ДСЛ-1-Д



1 л

10 шт.

ДСЛ-1-ДП



1 л

10 шт.

ДСЛ-5



5 л

4 шт.

ДСЛ-5-Э



5 л

4 шт.

ДЕЗИСОФТ®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Дезинфицирующее жидкое мыло:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. для профилактики пролежней;
- обработка предметов ухода за больными и средств личной гигиены.

Антимикробная активность:

Средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами, фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии.

Состав:

Деионизированная вода, триклозан (0,3%), 2-феноксиэтанол, ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка.



Артикул: ДС-05-Д



Фасовка: 500 мл

В упаковке: 10 шт.

ДС-05



500 мл

12 шт.

ДС-1



1 л

10 шт.

ДС-1-Д



1 л

10 шт.

ДС-1-ДП



1 л

10 шт.

ДС-5



5 л

4 шт.

ДС-5-Э



5 л

4 шт.

ДЕЗИКВАРТ®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Дезинфицирующее жидкое мыло:

- гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- санитарная обработка кожных покровов.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций и ВБИ), грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Деионизированная вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид (1,0%), ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексобразователь, регулятор кислотности.

Артикул: ДК-05-Д



Фасовка: 500 мл

В упаковке: 10 шт.

ДК-1



1 л

10 шт.

ДК-1-Д



1 л

10 шт.

ДК-1-ДП



1 л

10 шт.

ДК-5



5 л

4 шт.

ДК-5-Э



5 л

4 шт.

ТЕТРАСОФТ®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Дезинфицирующее жидкое мыло:

- гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- профилактическая обработка рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа;
- санитарная обработка кожных покровов (в т.ч. ступней ног).

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций и ВБИ), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Деионизированная вода, ундециленамидопропилтримониум метосульфат (0,5%), ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексообразователь, регулятор кислотности.



Артикул: TC-1



Фасовка: 1 л

В упаковке: 10 шт.

TC-1-Д



1 л

10 шт.

TC-1-ДП



1 л

10 шт.

TC-5



5 л

4 шт.

TC-5-Э



5 л

4 шт.

ИЗИСОФТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Дезинфицирующее жидкое мыло:

- гигиеническая обработка рук хирургов перед использованием кожного антисептика, гигиеническая обработка рук и кожных покровов, профилактическая обработка предметов ухода за больными и средств личной гигиены, дезинфекция и мытье посуды;
- санитарная обработка кожных покровов.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ИСМП), грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

2-феноксиэтанол (0,5%), поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей, вода.

Артикул: ИС-05-Д

ИС-1

ИС-1-ДП

ИС-5

ИС-5-Э



Фасовка: 500 мл

1 л

1 л

5 л

5 л

В упаковке: 10 шт.

10 шт.

10 шт.

4 шт.

4 шт.

МАНИДЕРМ®

ШАПОЧКИ/РУКАВИЦЫ



Уход за кожей:

- очищение кожи головы и тела от загрязнений в условиях ограниченного количества воды.

Состав:

Деионизированная вода, лаурилглюкозид, диметикон, глицерин, токоферола ацетат (витамин Е), пантенол (провитамин В5), аллантоин, полисорбат-20, линоламидопропил ПГ-димониум хлорид фосфат, экстракт Алоэ вера, экстракт цветков ромашки, парфюмерная композиция, лимонная кислота, феноксизтанол, этилгексилглицерин.

Артикул: МН-3-Ш

МН-10-В

шапочки

рукавицы

Фасовка: 3 шт.

10 шт.

В упаковке: 4 шт.

12 шт.



МАНИДЕРМ

КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И ТЕЛА



Уход за кожей:

- уход за кожей рук после применения антибактериального мыла;
- уход за кожей рук после использования кожных антисептиков;
- уход за кожей рук после взаимодействия с моющими и дезинфицирующими средствами.

Состав:

Цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетил пальмитат, цетеарет-20, цетеарет-12, изопропилпальмитат, октилдодеканол, глицерин, масло оливы, циклопентасилоксан, диметиконол, полиакрилат натрия, трилон Б, экстракт Алоэ Вера, экстракт календулы, витамин Е, Д-пантенол, парфюмерная композиция, диазолидин мочевина, консервант, вода.

Артикул: МН-125

МН-05-Д



Фасовка: 125 мл

В упаковке: 20 шт.



500 мл

20 шт.

МАНИДЕРМ® ПРОТЕКТ

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ РУК
ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ



Уход за кожей:

- для защиты кожи рук от воды, разбавленных водных растворов кислот, щелочей, солей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, дезинфицирующих средств, растворов цемента, извести в медицинских организациях, в быту, в условиях промышленного производства.

Состав:

Вода, цетеариловый спирт, масло вазелиновое, стеариновая кислота, вазелин, глицерин, полиакрилат натрия, ксантановая камедь, феноксиэтанол, глицерил лаурат, полисорбат-20, парфюмерная композиция, бутилгидрокситолуол (БГТ), динатриевая соль ЭДТА.

Артикул: МНП-125

МНП-05-Д



Фасовка: 125 мл

В упаковке: 20 шт.



500 мл

20 шт.



СОИНСБОДИ (SOINSBODY)

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ЛЕЖАЧИМИ БОЛЬНЫМИ



Уход за кожей:

- санитарная обработка кожных покровов пациентов (включая лежачих больных) перед оперативными вмешательствами и в процессе ежедневного ухода;
- гигиеническая обработка кожных покровов, в т.ч. тяжелобольных пациентов;
- мытье и устранение неприятных запахов, снижение количества резидентной микрофлоры перед оперативными вмешательствами, уход за пациентами;
- профилактика пролежней;
- мытье и гигиеническая обработка головы, волос в условиях ограниченного количества воды, в т.ч. в очагах инфекционных заболеваний и при уходе за тяжелобольными людьми.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ИСМП, ООИ), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Хлоргексидина биглюконат (0,4%) и другие вспомогательные компоненты, в т.ч. способствующие удалению (смыванию) загрязнений, увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки, деионизированная вода.

Артикул: СБ-3-Ш



Фасовка: 3 шт.

В упаковке: 4 шт.

СБ-10-В



10 шт.

12 шт.

СБ-200



200 мл

28 шт.



готовый раствор

ЭКСТРАСЕПТИК

НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ



Дезинфекция кожных покровов:

- гигиеническая обработка кожи рук, ступней ног.



Влажные салфетки:

- очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов;
- очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- очистка и дезинфекция поверхностных датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви.



Экспресс-дезинфекция:

- очистка и экспресс-дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- обработка накожных датчиков диагностического оборудования (УЗИ, ЭКГ и т.п.);
- очистка и экспресс-дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.


Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламмоний (0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), синергитический компонент биоцидного действия, вспомогательные компоненты, вода.

Артикул: ЭС-1 ЭС-1-Д ЭС-5 ЭС-075-ТР ЭС-120 ЭС-120-ФП ЭС-1000

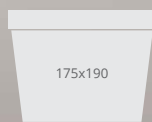

Фасовка: 1 л 1 л 5 л 750 мл 120 шт. 120 шт. 1000 шт.

В упаковке: 10 шт. 10 шт. 4 шт. 16 шт. 20 шт. 10 шт. 1 шт.



ДЕЗМАНОЛ ПУР

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- обработка рук хирургов, медицинского персонала, участвующего в проведении операций, приеме родов и контакте с новорожденными детьми;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов, проведением проколов, рассечений, биопсии;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей, в т.ч. при проведении прививок и перед введением вакцин, взрослых пациентов и детей с 7 лет;
- гигиеническая обработка рук медицинского персонала, медицинских работников различных учреждений.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ИСПМ; вирусов, в т.ч. риновирусов, норовирусов, ротавирусов, аденовирусов, коронавируса, энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, гриппа, парагриппа, герпеса, кори, ОРВИ, Эбола, Марбург и пр.; патогенных грибов рода Кандида.

Состав:

изопропиловый спирт (2-пропанол) (75,0%), функциональные добавки, вода.

Артикул: ДМП-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.



готовый раствор

ОПТИДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА



Дезинфекция кожных покровов:

- гигиеническая обработка кожи рук;
- профилактическая дезинфекция ступней ног.



Экспресс-дезинфекция:

- очистка и экспресс-дезинфекция небольших по площади, трудно-доступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, игрушек;
- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования, куветов;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Артикул: ОД-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

ОД-05



5 л
4 шт.

ОД-05-ТР



500 мл
20 шт.

ОД-075-ТР



750 мл
16 шт.



ОПТИДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА



Влажные салфетки:



- очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, игрушек;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования, куветов, датчиков диагностического оборудования, стоматологических наконечников;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.



Состав:

Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул: ОД-100 ОД-200 ОД-250 ОД-200-ДП ОД-120-ФП ОД-120-В ОД-150-В ОД-250-В ОД-300-В

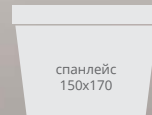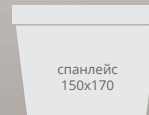

Фасовка: 100 шт. 200 шт. 250 шт. 200 шт. 120 шт. 120 шт. 150 шт. 250 шт. 300 шт.
В упаковке: 6 шт. 6 шт. 6 шт. 10 шт. 10 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

ДЕЗИПТОЛ® УЛЬТРА

СПИРТОВОЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Дезинфекция кожных покровов:

- обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- частичная санитарная обработка кожных покровов.



Экспресс-дезинфекция:

- экспресс-дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, игрушек, поверхностей медицинских изделий, куветов, датчиков диагностического оборудования; обработка ампул;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви, перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ИСМП, ООИ, легионеллеза); вирусов (включая вирусы полиомиелита, гепатитов, ВИЧ, гриппа, герпеса, риновирусы, коронавирусы и пр.); патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также плесневых грибов.

Состав:

Изопропиловый спирт (75,0%), ундециленамидопропилтримониум метосульфат (0,5%), молочная кислота (0,05%), хлоргексидина биглюконат (0,05%), а также поверхностно-активные вещества, вспомогательные компоненты, вода.



Артикул: ДПУ-01-С ДПУ-05 ДПУ-1 ДПУ-1-ДП ДПУ-5 ДПУ-5-Э ДПУ-075-ТР



Фасовка: 100 мл

В упаковке: 50 шт.



500 мл

12 шт.



1 л

10 шт.



1 л

10 шт.



5 л

4 шт.



5 л

10 шт.



750 мл

16 шт.

СТЕРИХЭНД ПЛЮС

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- антисептическая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров, пункцией суставов, проведением проколов, рассечений, биопсии;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей пациентов;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- профилактическая дезинфекция ступней ног.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Пропиловый спирт (50%), изопропиловый спирт (25%), хлоргексидина биглюконат (0,5%), вспомогательные компоненты, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

Артикул: СТП-01-С СТП-05 СТП-1



Фасовка: 100 мл
В упаковке: 50 шт.



500 мл
12 шт.



1 л
10 шт.

СЕПТОДЕРМ ХАУТ

СПИРТОВОЙ
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка кожи инъекционного и операционного полей, локтевых сгибов доноров;
- гигиеническая обработка рук персонала;
- частичная санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. ступней ног.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая возбудителей ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Изопропиловый спирт (63,0%), вспомогательные компоненты, отдушка, вода.

Артикул: СХТ-02 СХТ-1



Фасовка: 200 мл 1 л
В упаковке: 15 шт. 10 шт.



СЕПТОДЕРМ ХЭНДЕ

СПИРТОВОЙ
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- антисептическая обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.;
- гигиеническая обработка рук персонала.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая возбудители ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Изопропиловый спирт (63,0%), функциональные компоненты, в т.ч. смягчающие кожу рук, вода.

Артикул: СХД-1

СХД-5



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

5 л
4 шт.

ДЕЗИПТОЛ

СПИРТОВОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ВЫПУСКАЕТСЯ В ФОРМЕ ЖИДКОСТИ И ГЕЛЯ



Дезинфекция кожных покровов:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- частичная санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. ступней ног.



Экспресс-дезинфекция:

- экспресс-дезинфекция небольших по площади труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, игрушек;
- экспресс-дезинфекция поверхностей приборов и аппаратов, медицинского оборудования;
- экспресс-дезинфекция датчиков диагностического оборудования, кардиоэлектродов;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

Состав:

Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.



Артикул геля: ДПГ-005

Артикул:

ДП-01-С

ДП-05

ДП-1

ДПГ-1

ДПГ-1-Д

ДП-1-ДП

ДП-5

ДП-5-Э

ДП-05-ТР ДП-075-ТР



Фасовка: 50 мл 100 мл 500 мл 1 л 1 л 1 л 5 л 5 л 500 мл 750 мл

В упаковке: 100 шт. 50 шт. 12 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт. 4 шт. 10 шт. 20 шт. 16 шт.

ДЕЗИПТОЛ гель

СПИРТОВОЙ
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- обработка кожи операционного и инъекционного полей с обозначением границ обработки.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксизетанол (0,3%), комплекс вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющих и ухаживающих за кожей рук, вода.

Артикул: ДПГО-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

СТЕРИХЭНД

СПИРТОВОЙ
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук;
- профилактическая дезинфекция ступней ног.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, деионизированная вода.



Артикул: СТ-01-С СТ-05 СТ-1 СТ-1-Д СТ-1-ДП



Фасовка:	100 мл	500 мл	1 л	1 л	1 л
В упаковке:	50 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.

СТЕРИХЭНД окрашенный

29

СПИРТОВОЙ
КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



Дезинфекция кожных покровов:

- обработка кожи операционного и инъекционного полей с обозначением границ обработки;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.



Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, краситель, деионизированная вода.

Артикул: СТО-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

готовый раствор

ГЛИАКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Экспресс-дезинфекция:

- очистка и дезинфекция от всех видов загрязнений (в том числе органических, удаление ржавчины, солей жёсткости, водного, мочевого камней) санитарно-технического оборудования (душевых кабин, раковин, ванн, унитазов и т.п.), отделочной плитки полов, стен, а также металлических, деревянных, ламированных и других поверхностей и предметов, не контактирующих с пищевыми продуктами.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций – *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* и пр., туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*); вирусов (в т.ч. вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, аденовирусов, коронавирусов, вирусов гриппа, в т.ч. типа А (H1N1, H5N1 и пр.) и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), герпеса; патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Ортофосфорная кислота (14,0%), гликолевая кислота (5,0%), анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, вспомогательные компоненты, вода.

Артикул: ГА-075



Фасовка: 750 мл

В упаковке: 12 шт.



готовый раствор

АЛЬФА ХЛОР

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

31



Экспресс-дезинфекция:

- очистка и экспресс-дезинфекция различных поверхностей, в т.ч. загрязненных биологическими выделениями (включая кровь), устойчивых к хлорактивным соединениям;
- очистка и экспресс-дезинфекция небольших по площади помещений, жесткой мебели, медицинских приборов и оборудования, стоматологических наконечников, датчиков УЗИ, предметов ухода за больными и др.;
- очистка и экспресс-дезинфекция санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря;
- проведение генеральных уборок, в т.ч. направленных на борьбу с плесенью.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ИСПМ, анаэробных инфекций; вирусов, в т.ч. риновирусов, норовирусов, ротавирусов, аденовирусов, коронавирусов, энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, гриппа, герпеса, кори, ОРВИ, Эбола, Марбург и пр.; грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

Состав:

гипохлорит натрия (1,0 %) (в пересчете на «активный хлор»), функциональные добавки, деионизированная вода.

Артикул: AX-120

AX-075-TP



Фасовка: 120 шт.

750 мл

В упаковке: 6 шт.

16 шт.

ПЕРОКСИДЕЗ® SW

БЕССПИРТОВОЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Экспресс-дезинфекция/Влажные салфетки:

- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, санитарно-технического оборудования;
- очистка и экспресс-дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и оборудования, аппаратов искусственного дыхания, куветов, МРТ;
- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- очистка и дезинфекция холодильных и морозильных установок;
- разрушение (деструкция) и предотвращение образования биопленок.



Артикул: ПДСW-60 ПДСW-120 ПДСW-075-TP



Фасовка:	60 шт.	120 шт.	750 мл
В упаковке:	20 шт.	20 шт.	16 шт.

готовый раствор

ПЕРОКСИДЕЗ® SW

33

БЕССПИРТОВОЕ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДВУ и стерилизация:

- очистка и дезинфекция небольших по площади, твердых непористых поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и оборудования, куветов, датчиков диагностического оборудования, стоматологических наконечников;
- предварительная очистка эндоскопов;
- ДВУ медицинских изделий, не имеющих замковых частей, каналов и полостей, соприкасающихся с кожными покровами и слизистыми, конструктивные особенности которых не допускают обработку способом погружения;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью.

Состав:

Перекись водорода (1,5%), а также гликолевая кислота, активаторы перекиси водорода, стабилизаторы и другие функциональные компоненты.



готовый раствор

ОПТИДЕЗ® ИЗО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА



Экспресс-дезинфекция/Влажные салфетки:

- очистка и экспресс-дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- обработка накожных датчиков диагностического оборудования (УЗИ, ЭКГ и т.п.);
- очистка и экспресс-дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*, внутрибольничных инфекций (ВБИ) и особо опасных инфекций (ООИ): чума, холера, туляремия и пр.); вирулицидной активностью (в т.ч. в отношении вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, ЕСНО, коронавирусов, гриппа и пр.); фунгицидной активностью (в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон).

Состав:

Изопропиловый спирт (30,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), молочная кислота (0,1%), гликолевая кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, в т.ч. поверхностно-активные вещества, вода.

Артикул: ОДИ-100 ОДИ-200 ОДИ-120-ФП ОДИ-075-ТР ОДИ-5



Фасовка:	100 шт.	200 шт.	120 шт.	750 мл	5 л
В упаковке:	6 шт.	6 шт.	10 шт.	16 шт.	4 шт.



жидкий концентрат

ПЕРОКСИДЕЗ® NEXT

35

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей/Очистка и дезинфекция/ ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, кузовов и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция белья, посуды, ковров, уборочного материала и инвентаря, предметов ухода за больными;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений;
- предотвращение образования и борьба с биопленками;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения;
- ДВУ жестких и гибких эндоскопов, УЗ-датчиков;
- стерилизация изделий медицинского назначения, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, медицинских инструментов к ним, УЗ-датчиков.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью, овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий).

Состав:

Перекись водорода (24,0%), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (5,0%), спирт изопропиловый (10,0%), а также поверхностно-активные вещества, функциональные компоненты и вода.

Артикул:

ПДН-1

ПДН-5



Фасовка:

1 л

5 л

тест-полоски

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

жидкий концентрат

АМИНОСЕПТ®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, ковриков, уборочного материала и инвентаря, предметов ухода за больными;
- дезинфекция кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- использование для пропитывания дезковриков, дезматов и дезбарьеров;
- проведение генеральных уборок.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (9,0% – суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (10,0%), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул: AC-1



Фасовка: 1 л

AC-5



5 л



тест-полоски



Очистка и дезинфекция:

- предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения;
- предстерилизационная/окончательная (перед ДВУ) очистка гибких и жестких эндоскопов;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. ротационные и замковые, инструментов к эндоскопам;
- дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной/окончательной очисткой, гибких и жестких эндоскопов.



АМИНОСЕПТ®

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ



Широкий спектр
антимикробной активности



Без фенолов и альдегидов



Универсальность применения

Предназначено для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность различного профиля и других организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Российский производитель дезинфицирующих средств

Дезнэт®
новый формат упаковки

В упаковке: 10 шт.

4 шт.

АМИНОСЕПТ® ГРАНДИ

37

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция различных поверхностей в помещениях, жесткой, мягкой мебели, приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды;
- дезинфекция кувезов, датчиков УЗИ; обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений;
- обработка объектов, пораженных плесневыми грибами, возбудителями паразитарных заболеваний;
- дезинфекция санитарного транспорта, систем мусороудаления, вентиляции и кондиционирования воздуха; проведение генеральных уборок.



Очистка и дезинфекция:

- предварительная (окончательная) очистка эндоскопов;
- предстерилизационная очистка медицинских изделий и эндоскопов;
- дезинфекция (в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) медицинских изделий и эндоскопов.



Антимикробная активность:

Средство эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, внутрибольничных инфекций, анаэробных инфекций, легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ), микобактерий туберкулеза); вирусов (в отношении всех известных вирусов, патогенных для человека, в т.ч. вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ и др.); обладает фунгицидной активностью (в т.ч. в отношении патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов) и овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий).

Состав:

В качестве действующих веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (18,0% – суммарно), N, N-бис-(3-аминопропил)додециламин (12,0%), а также функциональные и технологические компоненты.

Артикул: АСГ-1

АСГ-5



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

5 л
4 шт.

тест-полоски

жидкий концентрат

ДЕЗМИНОЛ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды, предметов ухода за больными;
- дезинфекция медицинских отходов, контейнеров и оборудования для их сбора;
- дезинфекция различных видов транспорта;
- дезинфекции обуви из резины и пластмасс;
- профилактика поражения помещений плесневыми грибами и их уничтожение;
- дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний;
- проведение генеральных уборок.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов (в т.ч. полиомиелита, аденовирусов, гепатитов, ВИЧ, коронавирусных инфекций, включая SARS-CoV-2, гриппа, ОРВИ и пр.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллус.

Состав:

Глиоксаль (8,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (5,0%), ПАВ, функциональные добавки, вода.



Очистка и дезинфекция:

- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, маникюрных, педикюрных, парикмахерских инструментов, медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты);
- предстерилизационная очистка, не совмещенная с дезинфекцией, эндоскопов и инструментов к ним;
- предстерилизационная очистка, совмещенная и не совмещенная с дезинфекцией, медицинских изделий из металлов (включая хирургические, стоматологические, маникюрные, педикюрные и парикмахерские инструменты) механизированным способом в УЗ-установках любого типа.



Артикул: ДМЛ-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

ДМЛ-5



5 л
4 шт.



тест-полоски

ДЕЗИТАЛЬ®

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция белья, посуды, предметов ухода за больными, личной гигиены, уборочного материала, инвентаря, обуви;
- обеззараживание медицинских отходов, выделений, биологических жидкостей;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- проведение генеральных уборок.



Очистка и дезинфекция:

- предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в т.ч. вращающиеся) инструменты, медицинские инструменты к эндоскопам;
- дезинфекция и предстерилизационная/окончательная (перед ДВУ) очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Глиоксаль (8,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (7,0% – суммарно), молочная кислота (2,0%), неионогенные ПАВ, функциональные добавки, вода.

Артикул: ДТА-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

ДТА-5



5 л
4 шт.



тест-полоски

гранулированный порошок

ПЕРОКСИДЕЗ® АКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей/ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- дезинфекция кувезов и приспособлений к ним;
- дезинфекция медицинских отходов классов Б и В;
- дезинфекция контейнеров для сбора отходов;
- обеззараживание биологических жидкостей и выделений, вакцин, иммунологических препаратов;
- проведение генеральных уборок;
- разрушение биопленок на различных поверхностях;
- ДВУ и стерилизация медицинских изделий, эндоскопов, датчиков УЗИ.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, сибирской язвы, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство обладает спороцидной активностью.

Состав:

Перкарбонат натрия (50,0-55,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные и функциональные компоненты.

Артикул: ПДА-1



Фасовка: 1 кг



тест-полоски

В упаковке: 6 шт.



стиральный порошок

ПЕРОКСИДЕЗ® КЛИНЕР

41

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция, стирка и отбеливание текстильных изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон ручным способом и в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Перкарбонат натрия (30,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), поверхностно-активные вещества, усиливающие добавки, умягчители воды, компоненты, препятствующие оседанию загрязнения на поверхности белья, регулятор пенообразования, комплексные добавки, углубляющие и освежающие цвет белья, в т.ч. белый, антикоррозийные компоненты, отдушка и другие функциональные компоненты.




Артикул:

ПДК-1

ПДК-3

ПДК-10

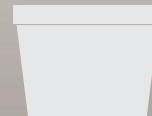

Фасовка:

1 кг

3 кг

10 кг

В упаковке:

6 шт.

2 шт.

—

жидкий концентрат

ПЕРОКСИДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция белья, посуды, ковриков, уборочного материала и инвентаря, предметов ухода за больными;
- дезинфекция куветов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных куриных яиц;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, зараженных возбудителями паразитарных заболеваний;
- проведение генеральных уборок.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью, овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий).

Состав:

Перекись водорода (18,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (12,0% – суммарно), комплекс молочной, ортофосфорной и лимонной кислот (не менее 1,5%), функциональные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.



Артикул: ПД-1

ПД-5



Фасовка: 1 л

5 л

тест-полоски

В упаковке: 10 шт.

4 шт.

ДЕЗИТАБС

ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка поверхностей:

- профилактическая и очаговая дезинфекция различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- дезинфекция систем мусороудаления, содержимого накопительных баков автономных туалетов;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, зараженных возбудителями паразитарных заболеваний;
- дезинфекция обуви из различных материалов, в т.ч. с целью профилактики инфекций грибковой этиологии;
- дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных куриных яиц;
- обеззараживание объектов при поражении плесневыми грибами;
- деконтаминация объектов, загрязненных ампликонами РНК/ДНК, проведение генеральных уборок.

Состав:

Не менее 84,0% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора – в таблетках (45,0%) и гранулах (56,0%), специальные функциональные добавки.



Артикул:

ДТ-1-300

ДТ-1-320

ДТ-1-Г

ДТ-033



Фасовка:

300 таб

320 таб

1 кг

100 таб

тест-полоски

В упаковке:

6 шт.

6 шт.

6 шт.

12 шт.

КЛИНИСЕПТ САЛФЕТКИ

БЕССПИРТОВЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ



Обработка поверхностей:

- очистка и дезинфекция небольших по площади твердых непористых поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей кузевов;
- очистка и дезинфекция различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования;
- очистка и дезинфекция датчиков диагностического оборудования;
- очистка наружных поверхностей шлангов гибких, жестких эндоскопов и колоноскопов;
- обработка обуви с целью профилактики грибковых заболеваний.

Антимикробная активность:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Смесь четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) – алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,5%) и дидецилдиметиламмония хлорид (0,25%), вспомогательные компоненты.



Артикул: 00-208-D100RU

00-208-T100



Фасовка: 100 шт.
В упаковке: 12 шт.

100 шт.
6 шт.

ДЕЗИВАЙПС®

САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ



Обработка поверхностей:

- Для обработки неповрежденной кожи, очищения и дезинфекции медицинских изделий и оборудования, а также поверхностей всех видов с целью обеззараживания и уничтожения патогенных микроорганизмов.



Антимикробная активность:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Этиловый спирт (63,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), хлоргексидина биглюконат (0,5%), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, вода.

Артикул: ДВМ-60



Фасовка: 60 шт.

В упаковке: 6 шт.

ДЕЗИВАЙПС-И

СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ



Обработка поверхностей:

- очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов;
- очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- очистка и дезинфекция поверхностных датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи инъекционного и операционного полей пациентов.

Антимикробная активность:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза); вирусов; патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Изопропиловый спирт (60,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, вода.

Артикул: ДВИ-100 ДВИ-70-ДП ДВИ-500С2 ДВИ-500С3 ДВИ-500С4



Фасовка: 100 шт.

В упаковке: 6 шт.



70 шт.

10 шт.



60x100

500 шт.

7 уп.



100x100

500 шт.

7 уп.



130x190


300 шт.

5 уп.



ДЕЗИВАЙПС ЭЛИТ

САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

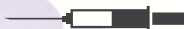

Обработка поверхностей:

- Предназначены для наружного местного применения в качестве антимикробного средства для обработки неповрежденной кожи, подготовки операционного поля и мест проколов (внутримышечных и внутривенных инъекций) до постановки инъекций, заборов крови, а также как средство для гигиенической обработки кожных покровов и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи медицинского персонала любого профиля.



Антимикробная активность:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека), патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Этиловый спирт (75,0%), вода.

Артикул: ДВЭ-500С

60x100



Фасовка: 500 шт.

В упаковке: 7 уп.

МЕДВАЙПС/ДЕСКО ВАЙПС/ЭКО ВАЙПС

ВЕДРА-ДИСПЕНСЕРЫ



Диспенсерные системы:

- очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования;
- очистка и дезинфекция датчиков диагностического оборудования.

Состав:

Нетканый материал «спан-лейс» (вискоза/полиэфир) различной плотности.





Артикул: 00-915-EK004

00-915-EEW002

MB-B3.9

MB-B5.6

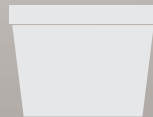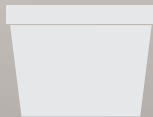

Фасовка:

3 л

5 л


3,9 л

5,7 л

МЕДВАЙПС

СУХИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЕДЕР-ДИСПЕНСЕРОВ

49

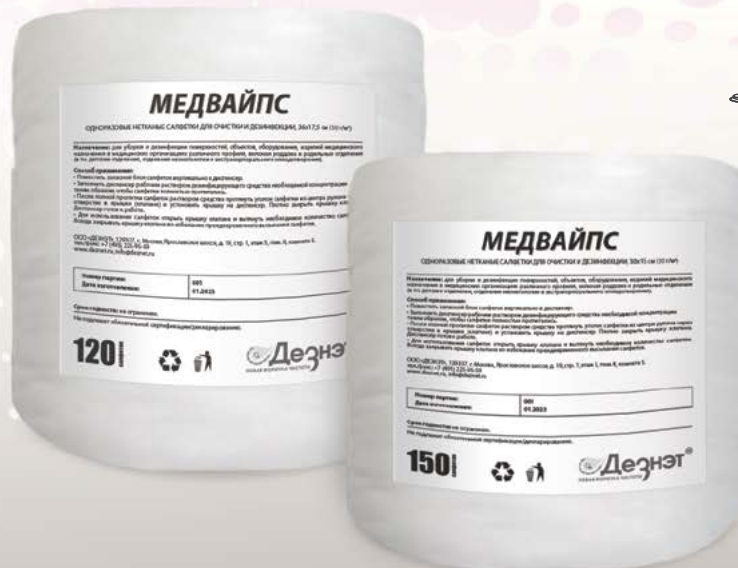

Сформированное в рулон в виде перфорированной ленты полотно из плотного белого нетканого материала. Салфетки помещаются в ведра-диспенсеры подходящих размеров и заливаются рабочим раствором дезинфицирующего средства. Салфетки обладают высокой прочностью, с легкостью извлекаются из ведра-диспенсера, при использовании не рвутся, не сбиваются в комок. Применяются в медицинских организациях различного профиля, включая роддома и родильные отделения (в т.ч. детские отделения, отделения неонатологии и экстракорпорального оплодотворения).

Артикул: MB-150 MB-100 MB-120 MB-200-40



300x150



300x320



360x175



300x150

Фасовка: 150 шт. 100 шт. 120 шт. 200 шт.

ВАН СИСТЕМ БЭЙСИК

ОДНОРАЗОВАЯ КОМПАКТНАЯ ДИСПЕНСЕРНАЯ СИСТЕМА
С САЛФЕТКАМИ ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ



Исключительно удобная и компактная диспенсерная система в новой инновационной упаковке-пакете с устойчивым дном проста, безопасна и эффективна в использовании. Идеально подходит для мест с различной степенью риска заражения. Диспенсерная система поставляется предварительно заполненной салфетками из высококачественных нетканых материалов DESOTEX® и может быть заполнена дезинфицирующим раствором по выбору клиента. Диспенсерная система готова к использованию уже через 15 минут после ее предварительного заполнения дезинфицирующим раствором и может немедленно использоваться для дезинфекции поверхностей.

Обработка поверхностей:

- очистка и дезинфекция всех видов поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования.

Состав:

Прочный, необразующий катышки нетканый материал – смесь из 100% синтетического ПЭТ-волокна.

Артикул: 00-915-OSEB120-01



Фасовка: 120 шт.
В упаковке: 4 шт.

жидкий концентрат

ИНСТРУ ПЛЮС

51

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ



Очистка и дезинфекция:

- предстерилизационная/окончательная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, гибких и жестких эндоскопов;
- очистка (мойка) лабораторной посуды.

Состав:

Неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, консервант и другие функциональные компоненты.

Артикул: 00-104-020-01

00-104-050



Фасовка:
В упаковке:

2 л
6 шт.

5 л
3 шт.

жидкий концентрат

ДЕЗЭНЗИМ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ



Очистка и дезинфекция:

- предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- окончательная очистка (перед ДВУ) эндоскопов;
- предстерилизационная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, эндоскопы и инструменты к ним.

Состав:

Протеаза (10,0%), вспомогательные компоненты (неионогенное ПАВ, стабилизирующие и диспергирующие добавки, растворители, консервант), вода.

Артикул: ДЭ-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

ДЭ-5



5 л
4 шт.



ДЕЗЭНЗИМ® MULTI

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ



Очистка и дезинфекция:

- для предварительной и предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов;
- для предварительной и предстерилизационной (окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня – ДВУ) очистки эндоскопов ручным способом;
- для предстерилизационной очистки инструментов к гибким эндоскопам ручным способом;
- для предстерилизационной очистки медицинских изделий, инструментов к эндоскопам механизированным способом с применением ультразвука;
- для предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ) очистки гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, медицинских изделий механизированным (в моющих и моюще-дезинфицирующих машинах – МДМ) способом;
- для предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ) очистки гибких эндоскопов в установках УДЭ-1 “КРОНТ”, МИУ-“КРОНТ”, КЭ-“КРОНТ” или иных;
- для мойки и очистки поверхностей и оборудования от различных загрязнений органического характера;
- для проведения текущих и генеральных уборок;
- для мойки поверхностей, оборудования с целью удаления органических загрязнений белковой и жировой природы на предприятиях пищевой промышленности (пивоваренной, ликероводочной, винодельческой, кондитерской, хлебной, мясо-, молоко- и рыбоперерабатывающей, масложировой, овощеконсервной и др.);
- для разрушения экзополисахаридного матрикса биологических пленок на поверхностях из различных материалов.



Состав:

Комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, манназа и целлюлаза), а также неионогенные ПАВ, функциональные компоненты и вода.

Артикул: ДЭМ-1

ДЭМ-5



Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

готовый раствор

ДЕЗЭНЗИМ SW

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ



Очистка и дезинфекция:

- предотвращение фиксации органических и других видов загрязнений на медицинских изделиях;
- предварительная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, микрохирургические и стоматологические инструменты;
- предварительная (в том числе контурная) очистка жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- обработка медицинских инструментов и эндоскопов при хранении и транспортировке.

Состав:

Смесь ферментов: протеаза, липаза, амилаза, маннанназа и целлюлаза, а также комплекс ПАВ, ингибитор коррозии, стабилизатор.

Артикул: ДЭСВ-075 ДЭСВ-120 ДЭСВ-Г



Фасовка: 750 мл



120 шт.



1 шт.

В упаковке: 16 шт.

3 шт.

10 шт.



готовый раствор

55

БИОФАЙНДЕР (BIOFINDER)

ЭКСПРЕСС-ИНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ МЕСТ
ЛОКАЛИЗАЦИИ БИОПЛЕНОК



Экспресс-индикатор с высокой достоверностью позволяет обнаруживать бактериальную контаминацию и бактерии в состоянии биологической плёнки на различных абиотических поверхностях, в т.ч. на медицинском оборудовании, медицинских инструментах, включая эндоскопическое оборудование, мебели при проведении контроля санитарно-гигиенических мероприятий на объектах здравоохранения, а также для контроля на потенциально опасных объектах общественного пользования, в системах водоснабжения, кондиционирования и увлажнения воздуха и в рамках производственного контроля на предприятиях всех форм собственности. Действие индикатора основано на реакции с ферментами антиоксидантной защиты бактерий, входящих в состав биоплёнок. Пена, которая образуется в месте нанесения индикатора в течение 5 – 30 секунд, показывает, где именно после мытья и дезинфекции остались опасные уровни клинически значимых микроорганизмов, находящихся в виде биоплёнок.

Экспресс-индикатор обладает моющим и дезинфицирующим действием, не портит и не окрашивает обрабатываемые поверхности, хорошо растворим в воде, легко смывается, экологически безопасен и биоразлагаем.

Состав:

Водно-спиртовой раствор пероксида водорода (5,0%), а также комплекс веществ, необходимый для разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки, функциональные и технологические компоненты, включая стабилизаторы пероксида водорода, ингибиторы коррозии, комплексообразователь, загуститель, краситель и др.

Артикул: БФ-025-Д

БФ-500-Д



Фасовка: 250 мл

В упаковке: 15 шт.



500 мл

8 шт.

жидкий концентрат

ПЕРФЕКТАН НЬЮ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Очистка и дезинфекция:

- предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним.

Антимикробная активность:

Средство обладает бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидным), вирулицидным, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида) действием.

Состав:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (3,6%), малеиновая кислота, антикоррозийные и другие функциональные добавки, вода.

Артикул: 00-136-050RU



Фасовка: 5 л
В упаковке: 3 шт.



**Очистка и дезинфекция:**

- предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов;
- предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной/окончательной (перед ДВУ) очисткой, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним.

Антимикробная активность:

Средство эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, ВБИ и анаэробных инфекций), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

Состав:

N,N-дидецил-*N*-метил-поли (оксизтил) аммония пропионат (5,6%), кокопропилендиамин-1,5-бис-гуанидина ацетат (3,75%), а также другие вспомогательные и функциональные компоненты.

Артикул: 00-122-020RU 00-122-050RU



Фасовка: 2 л 5 л тест-полоски
В упаковке: 6 шт. 3 шт.



ДЕЗИТАЛЬ ЭНДО



- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, фунгицидной и спороцидной активностью.

Базовый раствор – глутаровый альдегид (2,4%), функциональные компоненты; активатор – щелочные компоненты и вспомогательные вещества.



В упаковке: 2 комп.



**ДВУ и стерилизация:**

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами.

Антимикробная активность:

Средство эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон. Обладает спороцидной активностью.

Состав:

Ортофталевый альдегид (0,55%), функциональные добавки и компоненты.

ОФАДЕЗ

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ



Широкий спектр антимикробной активности



Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов за 5 минут



Может применяться многократно

Предназначено для персонала медицинских, лечебно-профилактических учреждений и организаций различного профиля, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Российский производитель дезинфицирующих средств



Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных, грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (алкогольная инфекция Коксаки, ЕСНО, аденовирусы, герпесвирусы, вирус гриппа, паравирусы, корновирусы человека, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы полиомиелита, энтеровирусы и парентеральные гепатиты, герпес, иммунодефицита человека и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также обладает спороцидной активностью. Тестировано на *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*.

Способ применения и меры первой помощи при случайном попадании подробно изложены в Инструкции по применению № 21/19 от 18.04.2019 г.

Меры предосторожности: использовать только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки. Избегать попадания в глаза. Все работы со средством необходимо проводить с защитой рук резиновыми перчатками, в хорошо вентилируемых помещениях или под вытяжным шкафом (зондой). Дезинфекцию следует проводить в закрытых емкостях.

Важно! при температуре от 0°C до +25°C в герметично закрытой оригинальной упаковке производителя в сухих, чистых, хорошо проветриваемых складских помещениях. Емкости от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и животных.

В экстренных ситуациях: в случае разлива средства его уборку необходимо проводить с использованием средств его уборки: средства индивидуальной защиты кожи рук и глаз. Пролитое средство следует разбавить большим количеством воды или адсорбировать инертными веществами (песок, силикагел) и направить на утилизацию. Слив компонентов средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде, не смешивая с другими дезинфицирующими средствами.

Состав: ортофталевый альдегид (0,55%), вспомогательные компоненты, вода.

ТУ 20.20.14-007-09521947-2019

Свидетельство о государственной регистрации №

RU77-99.88.000.1.0019.04.05.19 от 28.05.2019 г.

Иготовлено ООО «Бизнес лаборатория», Россия, 107143, г. Москва,

ул. Воронки, д. 8, стр. 1.

По заказу и ИТД: ООО «ДЕНЭТ», Россия, 129337, г. Москва,

Воскресенское шоссе, д. 19, стр. 1, этаж 5, помещение В, комната 5,

Москва, Каширский бульвар, д. 60, стр. 1.

Тел./факс: +7 (495) 980-08-99, +7 (495) 247-55-45,

www.deznet.ru,

e-mail: info@deznet.ru.

Срок годности: 2 года в не вскрытой упаковке изготовителя при соблюдении условий хранения. При вскрытии канистры срок хранения: 75 суток.

Номер партии:

Дата изготовления:



Артикул: ОФА-5



Фасовка:
В упаковке:

5 л
4 шт.



тест-полоски

ПЕРОКСИДЕЗ® НУК



- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, УЗ-датчиков ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, УЗ-датчиков, ручным и механизированным способами;
- предотвращение образования и борьба с биопленками.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спородидной активностью.

Базовый раствор – перекись водорода (3,2%), ингибитор коррозии, стабилизатор и другие функциональные компоненты; активатор – ацетилкапролактam, вспомогательные компоненты.



Фасовка:
В упаковке:

 Различные способы (виды) обработки

 Быстрое время обеззараживания

 Быстрое время обеззараживания

Предназначено для использования в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность различного профиля и других организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Российский производитель дезинфицирующих средств



Дезнэт®
НОВАЯ ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ

Назначение дилат-флексид изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, приспособления для лечения заболеваний, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зуботехнические аппараты, из металлов, сплавов, полимеров, керамики, композитов и других материалов, сплюснутости, гравитационной, жесткости и гибкости изделий, инструментов к ним, 73-дilatчиков ручных и механизированных способом дилатации высокого трения эндоскопов, 73-дilatчиков ручных и механизированных способом стереоизации изделий медицинского назначения из различных материалов, жесткости и гибкости эндоскопов, инструментов к ним, 73-дilatчиков ручных и механизированных

[illegible]

ВНИМАНИЕ! Применять только с активатором!
Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухих, крытых складских помещениях, удаленных от источников тепла, избегать попадания прямого солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов.

Меры предосторожности: работы со средством следует проводить в помещениях с принудом вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении. Все материалы, со средством многократно взаимодействовавшие, подлежат утилизации.

мом поведении. Все манипуляции со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Глаз – термическими ожогами. При всех работах со средством следует избегать его попадания в рот, глаза и на кожу. Курить, пить и принимать пищу во время работы со средством строго запрещено. Емкости со средством при обработке изделий должны

Состав: 3,2±1,0% перекиси водорода, а также ингибитор коррозии, стабилизатор и другие компоненты.
ТУ 20.20.14-018-09521947-2021 с изм. №1

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.02.0.001004.14.23 от 11.04.2023 г.

Издательство: А) ООО «ДЭНТ», 115516, Россия, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 68, стр. 1; Б) ООО «Завод ГРЭС», 605000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Ярославский пр-д, д. 100, стр. 1, 3-й этаж.

По заказу ИИТД ООО «ДЕЗНГТ», Россия, 129337, г. Москва,
Ирсолавского шоссе, д.19, стр.1, этаж 5, пом.42/001/02, комната 5.
Претензии по качеству принимаются: ООО «ДЕЗНГТ», 115516,

Срок годности: 3 года в не вскрытой оригинальной упаковке изготовителя

при соблюдении условий хранения.

ПЕРОКСИДЕЗ® ЛАЙТ

61

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, фунгицидной и спороцидной активностью.

Состав:

Перекись водорода (7,2%), надуксусная кислота (0,2%), ингибитор коррозии, стабилизатор и другие функциональные компоненты.

Артикул: ПДЛ-5



Фасовка: 5 л
В упаковке: 4 шт.

ПЕРОКСИДЕЗ® ЛАЙТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ГОТОВЫЙ РАСТВОР



Широкий спектр
антимикробной активности

Различные способы (виды)
обработки

Быстрое время обеззараживания

Предназначено для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность различного профиля и других организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Российский производитель дезинфицирующих средств



Назначение: дезинфекция изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, ручных и механизированных способом (в том числе при обработке с ультразвуковой обработкой) в установках для дезинфекции высокого уровня гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным способом, дезинфекция высокого уровня гибких эндоскопов механизированным способом в установках УДВ-1, «ВРОИТ», стерилизация надежной медицинской полимерной и различной материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способом.

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, особо опасных инфекций (ООИ), микобактерий туберкулеза – тестировано на М. tuberculosis в отношении всех известных вирусов, патогенных для человека, в т.ч. вирусов полиомея, герпеса и паротита, гепатита, ВИЧ, энтеровирусов, коронавирусов, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, норовирусов, интерстициальных вирусов, вируса кори, ОРВИ, вируса эпидемического паротита (EPI), герпеса, цитомегаловирусной инфекции и пр.); фунгицидной и спороцидной активностью.

Способ применения: перед применением и после окончания при применении отравления подробно изложены в Инструкции № 31/21 от 31.03.2021 г. по применению средства.

Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухих, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов при температуре от +5°C до +35°C. Средство сохраняет свои свойства после криоконсервирования и последующего оттаивания.

Состав: перекись водорода (7,2%), надуксусной кислоты (0,2%), а также ингибитор коррозии, стабилизатор и другие компоненты, pH = 3,2±0,5.

ТУ 20.20.14-017-09521947-2021

Свидетельство о государственной регистрации №

RU27.9938.02.8.001015.01.21 от 04.06.2021г.

Изготовитель: АО ООО «ДЕНЗЭТ», 115516, Россия, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 63, стр. 1, б/о ООО «Завод ПК», 690000, Россия, Умгородская область, г. Дзержинск, Восточный промышленный Ортостол, 5 км к ЮЗ и Юго-восточного шоссе, 1.

По заказу и ИТУ: ООО «ДЕНЗЭТ», Россия, 129337, г. Москва, Ярославского шоссе, д.19, с/п.1, этаж 5, помещение 8, комната 5.

Претензии по качеству продукции: ООО «ДЕНЗЭТ», 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 63, стр. 1.

Тел./факс: +7 (495) 980-06-09, +7 (495) 242-55-45.

www.deznat.ru, e-mail: info@deznat.ru.

Срок годности: 5 лет в неэкспортированной упаковке и изготовлении при соблюдении условий хранения.

Номер партии:
Дата изготовления:



готовый раствор

ДЕСКОТОН 2% ГДА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, УЗ-датчиков;
- стерилизация медицинских изделий из различных материалов, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, УЗ-датчиков, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает спороцидной активностью.

Состав:

Глутаровый альдегид (2,15%), стабилизатор и другие функциональные компоненты.

Артикул: 00-135-050RU



Фасовка: 5 л

В упаковке: 3 шт.



тест-полоски



ДЕСКОТОН ЭКСТРА

63

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает спороцидной активностью.

Состав:

Глutarовый альдегид (12,0%) и другие вспомогательные компоненты.

Артикул: 00-150-050RU



Фасовка: 5 л
В упаковке: 3 шт.

тест-полоски

гранулированный порошок

ПЕРФЕКТАН АКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



ДВУ и стерилизация:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, УЗ-датчиков;
- стерилизация медицинских изделий, гибких и жестких эндоскопов, медицинских инструментов к ним, УЗ-датчиков.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спороцидной активностью.

Состав:

Перкарбонат натрия (45%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), другие вспомогательные и функциональные компоненты.

Артикул: 00-155-010RU



Фасовка:

1 кг



тест-полоски

В упаковке:

6 шт.



готовый раствор

ДЕЗИПТОЛ® ИЗО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

65



ДВУ и стерилизация:

- удаление влаги из полостей медицинских изделий (в том числе эндоскопов), подвергающихся дальнейшей обработке;
- экспресс-дезинфекция и очистка поверхностей в помещениях, поверхностей медицинских изделий, медицинской техники, стоматологических наконечников, поверхностных датчиков диагностического оборудования.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*, ИСМП, особо опасных инфекций, возбудителей легионеллеза); вирусов (в т.ч. вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, аденовирусов, риновирусов, коронавирусов, вирусов гриппа, парагриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, вируса “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и пр.); патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также плесневых грибов.

Состав:

Изопропиловый спирт (2-пропанол) (70% масс.), вода очищенная.

Артикул: ДПИ-1



Фасовка: 1 л
В упаковке: 10 шт.

гранулированный порошок

ПЕРОКСИДЕЗ® ОРТО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка слюноотсосов:

- дезинфекция и очистка стоматологических отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам (слюноотсосы) и плевательниц.

Антимикробная активность:


Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, возбудителей легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Перкарбонат натрия (30%), тетраацетилэтил-ендиамин (ТАЭД), а также ПАВ, чистящие и пеногасящие компоненты, отдушка и другие добавки.

Действующим веществом в рабочем растворе средства является надуксусная кислота (55-120 мг/г).

Артикул: ПДО-05

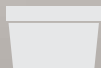

Фасовка: 0,5 кг
В упаковке: 12 шт.

жидкий концентрат

ДЕСКОСАК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

67



Обработка слюноотсосов:

- очистка и дезинфекция отсасывающих систем;
- очистка и дезинфекция слюноотсосов;
- очистка и дезинфекция плевательниц.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

Диалкилдиметиламмония хлорид (6,0%), функциональные компоненты.

Артикул: 00-814-020RU

00-814-050RU



Фасовка:
В упаковке:

2 л
6 шт.

5 л
3 шт.

жидкий концентрат

ДЕСКОСУК КЛИНЕР

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка слюноотсосов:

- регулярная интенсивная очистка стоматологических отсасывающих систем с сепаратором амальгамы и без, плевательниц и шлангов.

Состав:

Органические кислоты, «5% фосфонатов.

Артикул: 00-818-050EXD-RU



Фасовка: 5 л
В упаковке: 3 шт.



готовый раствор

АМИНОСЕПТ® ДЕНТАЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

69



Обработка стоматологических инструментов:

- дезинфекция и очистка стоматологических материалов, в т.ч. оттисков, изделий для протезирования, зубопротезных заготовок, артикуляторов, слепочных ложек и пр.;
- дезинфекция (в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов из различных материалов ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа;
- дезинфекция стоматологических наконечников.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.и Трихофитон.

Состав:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,75%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,5%), ПАВ, функциональные добавки, вода.

Артикул:

АСД-1

АСД-5



Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

готовый раствор

ДЕСКО ДРИЛЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



Обработка стоматологических инструментов:

- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, стоматологических боров и других вращающихся точных инструментов;
- дезинфекция зеркал с амальгамой.

Антимикробная активность:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

Состав:

N,N-дидецил-*N*-метил-поли (оксиэтил) аммония пропионат (0,28%), кокопропилендиамин-1,5-бис-гуанидина ацетат (0,17%), вспомогательные и функциональные компоненты.

Артикул:

00-815-010RU

00-815-050RU



1 л

12 шт.



5 л

3 шт.

Фасовка:

В упаковке:



готовый раствор

ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

71



Обработка стоматологических инструментов:

- очистка медицинских изделий, в т.ч. стоматологических, из различных материалов;
- удаление остатков альгината и цемента, а также пятен цинка-эвгенола;
- очистка от стоматологических паст перевязки и заготовок из гипса;
- удаление нежелательных наклеек и старых меток, а также остатков клея;
- удаление остатков йода и прочих цветных пятен.

Состав:

Натуральное апельсиновое масло, децилолеат.

Артикул: 00-805-0025RU



Фасовка: 0,25 л
В упаковке: 9 шт.



ООО «ДЕЗНЭТ»
115516, г. Москва,
Кавказский б-р, д. 60, стр. 1.
+7 (495) 980 08 99
+7 (495) 247 55 45

info@deznet.ru
www.deznet.ru

Российский производитель дезинфицирующих средств

