



 **Дезнэт**  
НОВАЯ ФОРМУЛА ЧИСТОТЫ

Производитель  
дезинфицирующих средств





# Дезнэт ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НАДЕЖНОСТЬ



*Гигиена имеет огромное значение в защите здоровья человека. В период пандемии новой коронавирусной инфекции, стерильность и дезинфекция приобрели особый уровень важности. Применение дезинфицирующих средств в профессиональных целях подразумевает обеспечение инфекционной безопасности групп людей, в том числе и в медицинской сфере, что еще более важно.*

*ДЕЗНЭТ поможет вам держать под контролем эти задачи и справляться с ними максимально эффективным способом.*

**ДЕЗНЭТ** работает с **2005** года. Преимущества компании:

- доступность выбора;
- высокое качество продукции;
- широкий ассортимент.

**Полная поддержка клиентов на всех этапах сотрудничества!**

## ВОЗМОЖНОСТИ

Стараясь быть полезными в комплексном обслуживании медицинских учреждений, мы расширяем линейку продукции в этом направлении. Ценовая политика\*, складские возможности, современная логистика и технологии – составляющие, благодаря которым нас выбирают.

*\*основанная на исследовании рынка дезинфицирующих средств*

## НАПРАВЛЕНИЯ

Оцените направления наших клиентов, возможно, и ваша деятельность нуждается в присутствии ДЕЗНЭТ!

- Медицина любого уровня
- Ветеринария
- Косметология
- Пищевое производство
- Общественное питание
- Общественный транспорт

## ПРОИЗВОДСТВО

Уже несколько лет дезинфицирующие средства, антисептики и жидкие мыла производства ДЕЗНЭТ обеспечивают эффективную и безопасную дезинфекцию по всей России.

Мы представляем на рынке дезинфекции наши новинки, разработанные с учетом всех возможных требований.

**Только максимальное качество, безопасность и комфорт использования.**

## ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

|                                                                                   |                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
|  | КОЖА И РУКИ.....                | 2  |
|  | ПОВЕРХНОСТИ.....                | 24 |
|  | САЛФЕТКИ.....                   | 38 |
|  | ИНСТРУМЕНТЫ<br>И ЭНДОСКОПЫ..... | 48 |
|  | СТОМАТОЛОГИЯ.....               | 66 |





к здоровью  
+  
через гигиену





## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

|                |   |
|----------------|---|
| Бэйбилайф..... | 4 |
| Бэйбисофт..... | 5 |
| Дезилайт.....  | 6 |

## ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

|                     |    |
|---------------------|----|
| Дезисофт® Лайт..... | 7  |
| Дезисофт.....       | 8  |
| Дезикварт.....      | 9  |
| Тетрасофт.....      | 10 |

## УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

|               |    |
|---------------|----|
| Манидерм..... | 11 |
|---------------|----|

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Экстрасептик®.....              | 12 |
| Деконтаман.....                 | 13 |
| Дезиптол® Ультра.....           | 14 |
| Оптидез.....                    | 15 |
| Септодерм Хаут .....            | 16 |
| Септодерм Хэнде.....            | 17 |
| Дезиптол.....                   | 18 |
| Дезиптол гель.....              | 19 |
| Стерихэнд.....                  | 20 |
| Стерихэнд окрашенный.....       | 21 |
| Стерихэнд плюс.....             | 22 |
| Вспомогательные устройства..... | 23 |



# БЭЙБИЛАЙФ

ДЕТСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка нежной и чувствительной детской кожи;
- гигиеническая обработка кожных покровов медицинского персонала с особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожей;
- санитарная обработка кожных покровов.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, натрия лауретсульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, глицерин, экстракт календулы, натрия хлорид, микрочер ИТ, лимонная кислота, парфюмерная композиция.



Артикул:

БЛ-05-Д

БЛ-1-Д



500 мл



1 л

Фасовка:

В упаковке:

10 шт.

10 шт.



# БЭЙБИСОФТ

ДЕТСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка кожи детских рук;
- гигиеническая обработка кожных покровов медицинского персонала с особо чувствительной кожей;
- санитарная обработка кожных покровов детей с первых дней жизни;
- в качестве средства для интимной гигиены.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, натрия кокосульфат, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, пантенол, масло макадамии, натрия хлорид, парфюмерная композиция, лимонная кислота, катон CG.

Артикул:

БС-05-Д

БС-1-Д



500 мл



1 л

Фасовка:

В упаковке:

10 шт.

10 шт.



# ДЕЗИЛАЙТ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- гигиеническая обработка рук после посещения мест массового скопления и длительного пребывания людей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов в быту.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропил бетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, натрия хлорид, лимонная кислота, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон, краситель, отдушка.



| Артикул:    | ДЛ-05-Д                                                                            | ДЛ-1                                                                               | ДЛ-1-Д                                                                             | ДЛ-5                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 500 мл                                                                             | 1 л                                                                                | 1 л                                                                                | 5 л                                                                                  |
| В упаковке: | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 4 шт.                                                                                |

# ДЕЗИСОФТ® ЛАЙТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов при уходе за больными;
- профилактическая обработка рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа;
- санитарная обработка кожных покровов;
- профилактическая обработка предметов ухода за больными, средств личной гигиены.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных (включая возбудителей кишечных инфекций, ИСМП) бактерий, вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, хлоргексидина биглюконат (1,0%), ПАВ, функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

| Артикул:    | ДСЛ-1                                                                             | ДСЛ-1-Д                                                                           | ДСЛ-1-ДП                                                                          | ДСЛ-5                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 1 л                                                                               | 1 л                                                                               | 1 л                                                                               | 5 л                                                                                |
| В упаковке: | 10 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                            | 4 шт.                                                                              |



# ДЕЗИСОФТ

ЖИДКОЕ МЫЛО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. для профилактики пролежней;
- обработка предметов ухода за больными и средств личной гигиены.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая возбудителей ВБИ, туберкулеза) микроорганизмов, вирулицидными свойствами, фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, триклозан (0,3%), 2-феноксиэтанол, ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка.

| Артикул:    | ДС-05-Д                                                                            | ДС-1                                                                               | ДС-1-Д                                                                             | ДС-1-ДП                                                                             | ДС-5                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 500 мл                                                                             | 1 л                                                                                | 1 л                                                                                | 1 л                                                                                 | 5 л                                                                                  |
| В упаковке: | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                              | 4 шт.                                                                                |



# ДЕЗИКВАРТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- санитарная обработка кожных покровов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций и ВБИ), грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, алкилдиметилбензиламмония хлорид (1,0%), ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексообразователь, регулятор кислотности.

| Артикул: | ДК-05-Д | ДК-1 | ДК-1-Д | ДК-1-ДП | ДК-5 |
|----------|---------|------|--------|---------|------|
|----------|---------|------|--------|---------|------|



|          |        |     |     |     |     |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Фасовка: | 500 мл | 1 л | 1 л | 1 л | 5 л |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|

|             |        |        |        |        |       |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| В упаковке: | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 4 шт. |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|



# ТЕТРАСОФТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- гигиеническая обработка рук работников различных организаций;
- профилактическая обработка рук и кожных покровов в очагах вируса гриппа;
- санитарная обработка кожных покровов (в т.ч. ступней ног).

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций и ВБИ), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Деионизированная вода, ундециленамидопропилтримониум метосульфат (0,5%), ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексообразователь, регулятор кислотности.

Артикул:

ТС-1

ТС-1-Д

ТС-1-ДП

ТС-5



Фасовка:

1 л

1 л

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

10 шт.

10 шт.

4 шт.



# МАНИДЕРМ

КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК И ТЕЛА

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- уход за кожей рук, после применения антибактериального мыла;
- уход за кожей рук, после использования кожных антисептиков;
- уход за кожей рук, после взаимодействия с моющими и дезинфицирующими средствами.

## СОСТАВ:

Цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетил пальмитат, цетеарет-20, цетеарет-12, изопропилпальмитат, октилдодеканол, глицерин, масло оливы, циклопентасилоксан, диметиконол, полиакрилат натрия, трилон Б, экстракт Алоэ Вера, экстракт календулы, витамин Е, Д-пантенол, парфюмерная композиция, диазолидинил мочевины, консервант, вода.

Артикул:

МН-125

МН-05-Д

Фасовка:

125 мл

500 мл

В упаковке:

20 шт.

10 шт.



# ЭКСТРАСЕПТИК®

БЕССПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка кожи рук, ступней ног;
- обработка кожи рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.



| Артикул:    | ЭС-01-С                                                                            | ЭС-1                                                                               | ЭС-1-Д                                                                             | ЭС-5                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 100 мл                                                                             | 1 л                                                                                | 1 л                                                                                | 5 л                                                                                  |
| В упаковке: | 50 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 4 шт.                                                                                |

# ДЕКОНТАМАН

БЕССПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка рук персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает бактерицидным (в т.ч. в отношении возбудителей ВБИ), туберкулоцидным, вирулицидным и фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действием.

## СОСТАВ:

Полиаминопропилбигуанида гидрохлорид (0,2%), вспомогательные компоненты, вода.



| Артикул:    | 00-610-0025RU | 00-610-010RU |
|-------------|---------------|--------------|
| Фасовка:    | 250 мл        | 1 л          |
| В упаковке: | 30 шт.        | 12 шт.       |



250 мл



1 л

Фасовка:

В упаковке:

30 шт.

12 шт.

# ДЕЗИПТОЛ® УЛЬТРА

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров и пункцией суставов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- частичная санитарная обработка кожных покровов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ИСМП, ООИ и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (75,0%), ундециленамидопропилтримоний метосульфат (0,5%), молочная кислота (0,05%), хлоргексидина биглюконат (0,05%), ПАВ, вспомогательные компоненты, вода.

| Артикул:    | ДПУ-01-С                                                                          | ДПУ-1                                                                             | ДПУ-1-ДП                                                                           | ДПУ-5                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 100 мл                                                                            | 1 л                                                                               | 1 л                                                                                | 5 л                                                                                 |
| В упаковке: | 50 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                             | 4 шт.                                                                               |

# ОПТИДЕЗ

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- гигиеническая обработка кожи рук;
- профилактическая дезинфекция ступней ног.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

Артикул:

ОД-1

ОД-5



Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.







# СЕПТОДЕРМ ХАУТ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка кожи инъекционного и операционного полей, локтевых сгибов доноров;
- гигиеническая обработка рук персонала;
- частичная санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. ступней ног;
- обеззараживание резиновых перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая возбудителей ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (63,0%), вспомогательные компоненты, отдушка, вода.

Артикул:

CXT-02

CXT-1



200 мл



1 л

Фасовка:

В упаковке:

15 шт.

10 шт.



# СЕПТОДЕРМ ХЭНДЕ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов и др.;
- гигиеническая обработка рук персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая возбудители ВБИ) и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (63,0%), функциональные компоненты, в т.ч. смягчающие кожу рук, вода.



Артикул:

СХД-1

СХД-5



Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

# ДЕЗИПТОЛ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- частичная санитарная обработка кожных покровов, в т.ч. ступней ног;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

| Артикул:    | ДП-01-С                                                                            | ДП-01-ФТ                                                                           | ДП-02-С                                                                            | ДП-1                                                                                | ДП-1-Д                                                                               | ДП-1-ДП                                                                              | ДП-5                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 100 мл                                                                             | 100 мл                                                                             | 200 мл                                                                             | 1 л                                                                                 | 1 л                                                                                  | 1 л                                                                                  | 5 л                                                                                  |
| В упаковке: | 50 шт.                                                                             | 50 шт.                                                                             | 15 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                              | 10 шт.                                                                               | 10 шт.                                                                               | 4 шт.                                                                                |

# ДЕЗИПТОЛ ГЕЛЬ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- профилактическая обработка ступней ног;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N, N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс вспомогательных компонентов, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

| Артикул:    | ДПГ-005                                                                           | ДПГ-01                                                                            | ДПГ-1                                                                             | ДПГ-1-А                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 50 мл                                                                             | 100 мл                                                                            | 1 л                                                                               | 1 л                                                                                |
| В упаковке: | 100 шт.                                                                           | 50 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                            | 10 шт.                                                                             |



# СТЕРИХЭНД

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов;
- обработка локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей;
- гигиеническая обработка рук;
- профилактическая дезинфекция ступней ног;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, деионизированная вода.

| Артикул:    | СТ-01-С                                                                            | СТ-1                                                                               | СТ-1-Д                                                                              | СТ-1-ДП                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 100 мл                                                                             | 1 л                                                                                | 1 л                                                                                 | 1 л                                                                                  |
| В упаковке: | 50 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                              | 10 шт.                                                                               |

# СТЕРИХЭНД ОКРАШЕННЫЙ

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- обработка кожи операционного и инъекционного полей с обозначением границ обработки;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (45,0%), пропиловый спирт (25,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,2%), функциональные добавки, ухаживающие за кожей компоненты, краситель, деионизированная вода.

Артикул:

СТО-1



Фасовка:

1 л

В упаковке:

10 шт.







# СТЕРИХЭНД ПЛЮС

СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- антисептическая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского персонала;
- обработка кожных покровов перед введением катетеров, пункцией суставов, проведением проколов, рассечений, биопсии;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей пациентов;
- гигиеническая обработка рук и кожных покровов;
- профилактическая дезинфекция ступней ног;
- обеззараживание перчаток при попадании на них инфекционного материала, сборе медицинских отходов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Пропиловый спирт (50%), изопропиловый спирт (25%), хлоргексидина биглюконат (0,5%), вспомогательные компоненты, в т.ч. увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

| Артикул:    | СТП-01-С                                                                                  | СТП-1                                                                                  | СТП-1-ДП                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фасовка:    |  100 мл |  1 л |  1 л |
| В упаковке: | 50 шт.                                                                                    | 10 шт.                                                                                 | 10 шт.                                                                                   |



# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЖИДКОГО МЫЛА  
И АНТИСЕПТИКОВ



**1.** Локтевой дозатор  
пластиковый



**2.** Локтевой дозатор  
алюминиевый



**3.** Локтевой дозатор  
SPE 1000




**4.** Автоматический  
дозатор с сенсорным  
управлением



**5.** Стойка  
для дозатора

к здоровью  
через гигиену



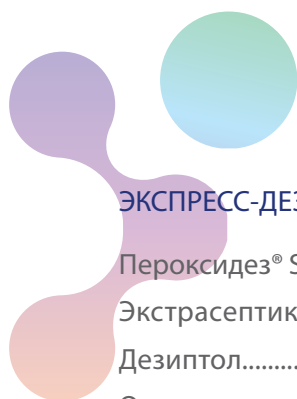

## ЭКСПРЕСС-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

|                     |    |
|---------------------|----|
| Пероксидез® SW..... | 26 |
| Экстрасептик® ..... | 27 |
| Дезиптол.....       | 28 |
| Оптидез.....        | 29 |

## ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Пероксидез® Актив.....  | 30 |
| Пероксидез® Клинер..... | 31 |
| Аминосепт.....          | 32 |
| Дезиталь.....           | 33 |
| Пероксидез.....         | 34 |
| Дезитабс.....           | 36 |
| Актизан.....            | 37 |



ГОТОВЫЙ РАСТВОР

# ПЕРОКСИДЕЗ® SW

БЕССПИРТОВОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, санитарно-технического оборудования;
- очистка и экспресс-дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и оборудования искусственного дыхания, куветов, МРТ;
- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала;
- очистка и дезинфекция холодильных и морозильных установок.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью.

## СОСТАВ:

Перекись водорода (1,5%), вспомогательные компоненты, в т.ч. активаторы перекиси водорода, гликолевая кислота, стабилизаторы и другие функциональные компоненты.

Артикул:

ПДСW-075-TP



Фасовка:

750 мл

В упаковке:

16 шт.

ГОТОВЫЙ РАСТВОР

## ЭКСТРАСЕПТИК®

БЕССПИРТОВОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и экспресс-дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- обработка накожных датчиков диагностического оборудования (УЗИ, ЭКГ и т.п.);
- очистка и экспресс-дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

### СОСТАВ:

Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул:

ЭС-075-ТР



Фасовка:

750 мл

В упаковке:

16 шт.



ГОТОВЫЙ РАСТВОР

**ДЕЗИПТОЛ**

СПИРТОВОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

- экспресс-дезинфекция небольших по площади труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, игрушек;
- экспресс-дезинфекция поверхностей приборов и аппаратов, медицинского оборудования;
- экспресс-дезинфекция датчиков диагностического оборудования, кардиоэлектродов;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

**АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:**

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

**СОСТАВ:**

Изопропиловый спирт (68,0%), дидецилдиметиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), 2-феноксиэтанол (0,3%), комплекс вспомогательных компонентов, вода.

Артикул:

ДП-05-ТР

ДП-075-ТР



Фасовка:

500 мл

750 мл

В упаковке:

20 шт.

16 шт.



# ГОТОВЫЙ РАСТВОР ОПТИДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и экспресс-дезинфекция небольших по площади, труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, игрушек;
- очистка и экспресс-дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования, куветов;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

| Артикул:    | ОД-05-ТР                                                                           | ОД-075-ТР                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |
| Фасовка:    | 500 мл                                                                             | 750 мл                                                                             |
| В упаковке: | 20 шт.                                                                             | 16 шт.                                                                             |



ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК

# ПЕРОКСИДЕЗ® АКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- дезинфекция кузовов и приспособлений к ним;
- дезинфекция обуви;
- дезинфекция медицинских отходов классов Б и В;
- дезинфекция контейнеров для сбора отходов;
- обеззараживание биологических жидкостей и выделений, вакцин, иммунологических препаратов;
- проведение генеральных уборок.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, сибирской язвы, легионеллеза и туберкулеза); вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство обладает спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Перкарбонат натрия (55,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные и функциональные компоненты.



Артикул:

ПДА-1

Фасовка:

1 кг

В упаковке:

6 шт.



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

# ПЕРОКСИДЕЗ® КЛИНЕР

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция, стирка и отбеливание текстильных изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон ручным способом и в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа.


## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Перкарбонат натрия (30,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), поверхностно-активные вещества, усиливающие добавки, умягчители воды, компоненты, препятствующие оседанию загрязнения на поверхности белья, регулятор пенообразования, комплексные добавки, углубляющие и освежающие цвет белья, в т.ч. белый, антикоррозионные компоненты, отдушка и другие функциональные компоненты.

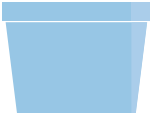

| Артикул:    | ПДК-1                                                                             | ПДК-3                                                                             | ПДК-10                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |
| Фасовка:    | 1 кг                                                                              | 3 кг                                                                              | 10 кг                                                                              |
| В упаковке: | 6 шт.                                                                             | 2 шт.                                                                             | —                                                                                  |

## ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ АМИНОСЕПТ

### ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, ковриков, уборочного материала и инвентаря, предметов ухода за больными;
- дезинфекция кузевов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- использование для пропитывания дезковриков, дезматов и дезбарьеров;
- проведение генеральных уборок.

#### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

#### СОСТАВ:

Смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (9,0% – суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (10,0%), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул:

AC-1

AC-5



1 л



5 л



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Фасовка:

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

# жидкий КОНЦЕНТРАТ **ДЕЗИТАЛЬ**

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция белья, посуды, предметов ухода за больными, личной гигиены, уборочного материала, инвентаря, обуви;
- обеззараживание медицинских отходов, выделений, биологических жидкостей;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- проведение генеральных уборок.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Глиоксаль (8,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и ди-децилдиметиламмоний хлорида (7,0% – суммарно), молочная кислота (2,0%), неионогенные ПАВ, функциональные добавки, вода.

Артикул:

ДТА-1

ДТА-5

Фасовка:

1 л

5 л

тест-полоски

В упаковке:

10 шт.

4 шт.





# ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ПЕРОКСИДЕЗ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- дезинфекция белья, посуды, ковриков, уборочного материала и инвентаря, игрушек, пеленальных столов, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены;
- дезинфекция кузовов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- профилактическая дезинфекция систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции;
- дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных куриных яиц;
- обеззараживание различных объектов в отношении плесневых грибов;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, зараженных возбудителями паразитарных заболеваний;
- проведение генеральных уборок.





### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью, в т.ч. бактерицидными свойствами в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов, спороцидной активностью, овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных заболеваний (инвазий), в т.ч. в отношении цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов.

### СОСТАВ:

Перекись водорода (18,0%); смесь алкилдиметилбензил-аммоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (12,0% – суммарно); комплекс молочной, ортофосфорной и лимонной кислот (не менее 1,5%), функциональные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул:

ПД-1

ПД-5

Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.

ТЕСТ-ПОЛОСКИ



ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ

**ДЕЗИТАБС**

ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

- профилактическая и очаговая дезинфекция различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи, емкостей из-под выделений и отходов;
- дезинфекция систем мусороудаления, содержимого накопительных баков автономных туалетов;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, зараженных возбудителями паразитарных заболеваний;
- дезинфекция обуви из различных материалов, в т.ч. с целью профилактики инфекций грибковой этиологии;
- дезинфекция поверхности скорлупы сырых и вареных куриных яиц;
- обеззараживание объектов при поражении плесневыми грибами;
- деконтаминация объектов, загрязненных ампликонами РНК/ДНК.

**СОСТАВ:**

Не менее 84,0% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора – в таблетках (45,0%) и гранулах (56,0%), специальные функциональные добавки.

| Артикул:    | ДТ-1-300                                                                          | ДТ-1-320                                                                          | ДТ-1-Г                                                                            | ДТ-05-Г                                                                            | ДТ-033                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 300 таб.                                                                          | 320 таб.                                                                          | 1 кг                                                                              | 0,5 кг                                                                             | 100 таб.                                                                            |
| В упаковке: | 6 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                              | 6 шт.                                                                               |



тест-полоски

ТАБЛЕТКИ

# АКТИЗАН

ХЛОРСОДЕРЖАЩЕЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- профилактическая и очаговая дезинфекция различных поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды;
- обеззараживание медицинских отходов, биологических жидкостей и выделений, остатков пищи;
- дезинфекция емкостей для хранения воды;
- дезинфекция общественного транспорта;
- противогрибковая обработка.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

98,0% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты с массовой долей активного хлора – (53 – 58%) – в качестве действующего вещества, а также специальные функциональные добавки.

Артикул:

A3-300



Фасовка:

300 таб.




ТЕСТ-ПОЛОСКИ

В упаковке:

6 шт.



к здоровью  
+  
через гигиену

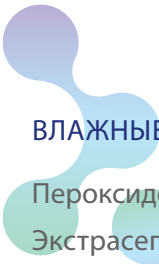

## ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Пероксидез® SW.....     | 40 |
| Экстрасептик.....       | 41 |
| Оптидез.....            | 42 |
| Клинисепт салфетки..... | 43 |
| Дезивайпс.....          | 44 |
| Дезивайпс-И.....        | 45 |

## ДИСПЕНСЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

|                        |    |
|------------------------|----|
| Медвайпс.....          | 46 |
| Ван Систем Бейсик..... | 47 |







## ПЕРОКСИДЕЗ® SW

БЕССПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция небольших по площади, твердых непористых поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и оборудования, куветов, датчиков диагностического оборудования, стоматологических наконечников;
- предварительная очистка эндоскопов;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций, сибирской язвы и легионеллеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью.

### СОСТАВ:

Перекись водорода (1,5%), вспомогательные компоненты, в т.ч. активаторы перекиси водорода, гликолевая кислота, стабилизаторы и другие функциональные компоненты.

| Артикул:    | ПДСW-60                                                                            | ПДСW-120-ФП                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |
| Фасовка:    | 60 шт.                                                                             | 120 шт.                                                                             |
| В упаковке: | 20 шт.                                                                             | 10 шт.                                                                              |

# ЭКСТРАСЕПТИК®

БЕССПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов;
- очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- очистка и дезинфекция поверхностных датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионеллеза и туберкулеза); вирусов; патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Дидецилдиметиламмония хлорид (0,35%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,15%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,25%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки, вода.

Артикул:

ЭС-120



Фасовка:

120 шт.

В упаковке:

20 шт.



# ОПТИДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ  
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, жесткой мебели, предметов ухода за больными, игрушек;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования, кувезов, датчиков диагностического оборудования, стоматологических наконечников;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обеззараживание перчаток, надетых на руки медицинского персонала.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Пропиловый спирт (28,0%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,1%), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,1%), полигексаметиленбигуанида гидрохлорид (0,05%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

| Артикул:    | ОД-60  | ОД-100  | ОД-200  | ОД-250  | ОД-200-ДП | ОД-120-ФП | ОД-120-В | ОД-150-В | ОД-250-В | ОД-300-В |
|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|             |        |         |         |         |           |           |          |          |          |          |
| Фасовка:    | 60 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 250 шт. | 200 шт.   | 120 шт.   | 120 шт.  | 150 шт.  | 250 шт.  | 300 шт.  |
| В упаковке: | 20 шт. | 6 шт.   | 6 шт.   | 6 шт.   | 10 шт.    | 10 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    | 2 шт.    |

# КЛИНИСЕПТ САЛФЕТКИ

БЕССПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция небольших по площади твердых непористых поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей кузезов;
- очистка и дезинфекция различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования;
- очистка и дезинфекция датчиков диагностического оборудования;
- очистка наружных поверхностей шлангов гибких, жестких эндоскопов и колоноскопов;
- обработка обуви с целью профилактики грибковых заболеваний.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Смесь четвертичных аммониевых соединений (0,75% – суммарно), вспомогательные компоненты, вода.

Артикул: 00-208-D100RU 00-208-T100

140x200  
MM

200x220  
MM

Фасовка: 100 шт.

100 шт.

В упаковке: 12 шт.

6 шт.



# ДЕЗИВАЙПС

СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция небольших по площади труднодоступных поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция предметов обстановки, наружных поверхностей приборов и аппаратов;
- очистка и дезинфекция медицинских изделий и медицинской техники;
- очистка и дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- гигиеническая обработка кожи рук;
- профилактическая дезинфекция ступней ног.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза и ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Этиловый спирт (63,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и ди-децилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), хлоргексидина биглюконат (0,5%), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, вода.

Артикул:

ДВ-60



Фасовка:

60 шт.

В упаковке:

6 шт.



# ДЕЗИВАЙПС-И

## СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция различных поверхностей и предметов обстановки в помещениях;
- очистка и дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов;
- очистка и дезинфекция предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря;
- очистка и дезинфекция поверхностных датчиков диагностического оборудования;
- дезинфекция внутренней поверхности обуви;
- обработка локтевых сгибов доноров, кожи инъекционного и операционного полей пациентов.

### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, ВБИ, ООИ, легионелла и туберкулеза); вирусов; патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

### СОСТАВ:

Изопропиловый спирт (60,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (0,2% – суммарно), молочная кислота (0,1%), вспомогательные компоненты, вода.



Артикул: ДВИ-60 ДВИ-100 ДВИ-70-ДП ДВИ-300С1 ДВИ-500С2 ДВИ-500С3 ДВИ-300С4

|             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасовка:    | 60 шт.                                                                            | 100 шт.                                                                           | 70 шт.                                                                            | 300 шт.                                                                           | 500 шт.                                                                           | 500 шт.                                                                           | 300 шт.                                                                             |
| В упаковке: | 6 шт.                                                                             | 6 шт.                                                                             | 20 шт.                                                                            | 6 уп.                                                                             | 8 уп.                                                                             | 5 уп.                                                                             | 5 уп.                                                                               |

# МЕДВАЙПС

ДИСПЕНСЕРНАЯ СИСТЕМА

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования;
- очистка и дезинфекция датчиков диагностического оборудования.

## СОСТАВ:

Нетканый материал «спанлейс» (вискоза/полиэфир) различной плотности.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Артикул: MB-B3.9 MB-B5.6 MB-150 MB-100 MB-120 MB-30-X MB-90-X

|          |       |       |         |         |         |        |        |
|----------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
|          |       |       |         |         |         |        |        |
| Фасовка: | 3,9 л | 5,7 л | 150 шт. | 100 шт. | 120 шт. | 30 шт. | 90 шт. |



Dr. Schumacher

# ВАН СИСТЕМ БЕЙСИК

ОДНОРАЗОВАЯ КОМПАКТНАЯ ДИСПЕНСЕРНАЯ СИСТЕМА  
С САЛФЕТКАМИ ИЗ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Исключительно удобная и компактная диспенсерная система в новой инновационной упаковке-пакете с устойчивым дном проста, безопасна и эффективна в использовании. Идеально подходит для мест с различной степенью риска заражения. Диспенсерная система поставляется предварительно заполненной салфетками из высококачественных нетканых материалов DESOTEX® и может быть заполнена дезинфицирующим раствором по выбору клиента. Диспенсерная система готова к использованию уже через 15 минут после ее предварительного заполнения дезинфицирующим раствором и может немедленно использоваться для дезинфекции поверхностей.

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция всех видов поверхностей в помещениях;
- очистка и дезинфекция поверхностей медицинских приборов и оборудования.

## СОСТАВ:

Прочный, необразующий катышки нетканый материал – смесь из 100% синтетического ПЭТ-волокна.

Артикул:

00-915-OSEB120-01

360x175  
мм

Фасовка:

120 шт.

В упаковке:

4 шт.



ДИСПЕНСЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

# ИНСТРУМЕНТЫ

# И ЭНДОСКОПЫ

♦ к здоровью  
+  
♦ через гигиену



## ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

|                    |    |
|--------------------|----|
| ДезЭнзимSW.....    | 50 |
| ДезЭнзим.....      | 51 |
| Инстру Плюс.....   | 52 |
| Аминосепт.....     | 53 |
| Дезиталь.....      | 54 |
| Перфектан ТБ.....  | 55 |
| Перфектан Нью..... | 57 |

## ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

|                        |    |
|------------------------|----|
| Дескотон 2% ГДА.....   | 58 |
| Дескотон Экстра .....  | 59 |
| Дезиталь Эндо.....     | 60 |
| Офадез.....            | 61 |
| Пероксидез® Лайт.....  | 62 |
| Пероксидез® НУК .....  | 63 |
| Пероксидез® Актив..... | 64 |
| Перфектан Актив.....   | 65 |







ГОТОВЫЙ РАСТВОР

## ДЕЗЭНЗИМ SW

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ  
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭНДОСКОПОВ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- предотвращение фиксации органических и других видов загрязнений на медицинских изделиях;
- предварительная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, микрохирургические и стоматологические инструменты;
- предварительная (в том числе контурная) очистка жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;
- обработка медицинских инструментов и эндоскопов при хранении и транспортировке.

### СОСТАВ:

Смесь ферментов: протеаза, липаза, амилаза, маннаназа и целлюлаза, а также комплекс ПАВ, ингибитор коррозии, стабилизатор.

Артикул:

ДЭСW-075

Фасовка:

750 мл

В упаковке:

16 шт.

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

# ДЕЗЭНЗИМ

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
И ЭНДОСКОПОВ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- окончательная очистка (перед ДВУ) эндоскопов;
- предстерилизационная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, эндоскопы и инструменты к ним.

## СОСТАВ:

Протеаза (10,0%), вспомогательные компоненты (неионогенное ПАВ, стабилизирующие и диспергирующие добавки, растворители, консервант), вода.



Артикул:

ДЭ-1

ДЭ-5



Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.



ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

# ИНСТРУ ПЛЮС

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
И ЭНДОСКОПОВ

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- предстерилизационная/окончательная очистка медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, гибких и жестких эндоскопов;
- очистка (мойка) лабораторной посуды.

## СОСТАВ:

Неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, консервант и другие функциональные компоненты.



Артикул:

00-104-050

Фасовка:

5 л

В упаковке:

3 шт.

# ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ АМИНОСЕПТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения;
- предстерилизационная/окончательная (перед ДВУ) очистка гибких и жестких эндоскопов;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. ротационные и замковые, инструментов к эндоскопам;
- дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной/окончательной очисткой, гибких и жестких эндоскопов.

## СОСТАВ:

Смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (9,0% – суммарно), N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (10,0%), полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (3,0%), вспомогательные компоненты, в т.ч. ПАВ, вода.

Артикул:

AC-1

AC-5



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Фасовка:

1 л

5 л

В упаковке:

10 шт.

4 шт.





## ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЕЗИТАЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- предварительная очистка гибких и жестких эндоскопов;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в т.ч. вращающиеся) инструменты, медицинские инструменты к эндоскопам;
- дезинфекция и предстерилизационная/окончательная (перед ДВУ) очистка, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов.

### СОСТАВ:

Глиоксаль (8,0%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (7,0% – суммарно), молочная кислота (2,0%), неионогенные ПАВ, функциональные добавки, вода.

Артикул:

ДТА-1

ДТА-5



1 л



5 л



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Фасовка:

В упаковке:

10 шт.

4 шт.



ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

# ПЕРФЕКТАН ТБ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним;
- окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов;
- предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения;
- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной/окончательной (перед ДВУ) очисткой, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, ВБИ и анаэробных инфекций), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов.

## СОСТАВ:

Дидецилдиметилоксиэтиламмония пропионат (5,63%), кокоспропилендиамингуанидина ацетат (3,75%), антикоррозийные и другие функциональные компоненты, вода.



Артикул: 00-122-020RU 00-122-050RU



Фасовка: 2 л

В упаковке: 6 шт.



5 л

3 шт.



тест-полоски





ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

# ПЕРФЕКТАН НЬО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- предварительная и окончательная (перед ДВУ) очистка эндоскопов;
- дезинфекция и предстерилизационная очистка, в т.ч. совместные в одном процессе, изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидным), вирулицидным, фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида) действием.

## СОСТАВ:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (3,6%), maleиновая кислота, антикоррозионные и другие функциональные добавки, вода.



Артикул:

00-136-050RU



Фасовка:

5 л

В упаковке:

3 шт.



ГОТОВЫЙ РАСТВОР

# ДЕСКОТОН 2% ГДА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:


- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Глutarовый альдегид (2,0%), стабилизатор, ингибиторы коррозии и другие функциональные компоненты.

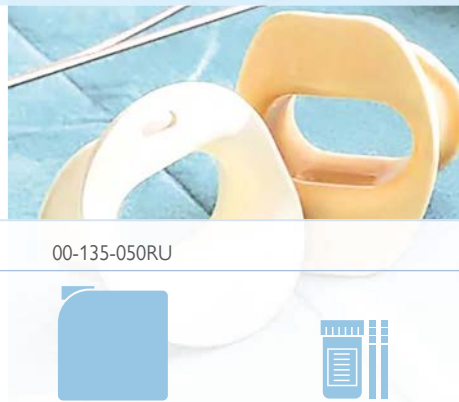

Артикул:

00-135-050RU



Фасовка:

5 л

В упаковке:

3 шт.



ТЕСТ-ПОЛОСКИ



ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ

# ДЕСКОТОН ЭКСТРА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Глutarовый альдегид (12,0%) и другие вспомогательные компоненты.

**STORZ**  
РЕКОМЕНДУЮТ

**PENTAX**  
РЕКОМЕНДУЮТ

Артикул: 00-150-020RU 00-150-050RU



Фасовка: 2 л  
В упаковке: 6 шт.



5 л  
3 шт.



тест-полоски





# ДЕЗИТАЛЬ ЭНДО

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, фунгицидной и спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Базовый раствор – глутаровый альдегид (2,4%), функциональные компоненты; активатор – щелочные компоненты и вспомогательные вещества.



Артикул:

ДТЛЭ-5



Фасовка:

4,75 л + 250 мл

В упаковке:

2 комп.



тест-полоски

# ГОТОВЫЙ РАСТВОР ОФАДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон. Обладает спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Ортофталевый альдегид (0,55%), функциональные добавки и компоненты.



Артикул:

ОФА-5

Фасовка:

5 л

В упаковке:

4 шт.



тест-полоски

# ПЕРОКСИДЕЗ® ЛАЙТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, фунгицидной и спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Перекись водорода (7,2%), надуксусная кислота (0,2%), ингибитор коррозии, стабилизатор и другие функциональные компоненты.



Артикул:

ПДЛ-5



Фасовка:

5 л

ТЕСТ-ПОЛОСКИ

В упаковке:

4 шт.

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

# ПЕРОКСИДЕЗ® НУК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, стоматологических материалов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами;
- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов ручным и механизированным способами;
- стерилизация ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способами.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей кишечных инфекций, туберкулеза, ВБИ, ООИ, анаэробных инфекций и сибирской язвы), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активности.

## СОСТАВ:

Базовый раствор – перекись водорода (3,2%), ингибитор коррозии, стабилизатор и другие функциональные компоненты; активатор – ацетилкапролактам, вспомогательные компоненты.

Артикул:

ПДН-5



Фасовка:

4,95 л + 50 мл



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

В упаковке:

2 компл.





ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК

# ПЕРОКСИДЕЗ® АКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ);
- стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов;
- дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения;
- дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, сибирской язвы, легионеллы и туберкулеза); вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство обладает спороцидной активностью.

## СОСТАВ:

Перкарбонат натрия (55,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные и функциональные компоненты.



Артикул:

ПДА-1

Фасовка:

1 кг

В упаковке:

6 шт.



ТЕСТ-ПОЛОСКИ



ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК

# ПЕРФЕКТАН® АКТИВ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, ВБИ), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов, спорцидной активностью.

## СОСТАВ:

Перкарбонат натрия (45,0%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), вспомогательные компоненты: синергисты биоцидов, комплексообразователь, стабилизатор и др.



Артикул:

00-155-010RU



1 кг



тест-полоски

Фасовка:

В упаковке:

6 шт.

к здоровью  
через гигиену





## ОБРАБОТКА СЛЮНООТСОСОВ

Пероксидез® ОРТО.....68

Дескосак.....69

## ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аминосепт® Денталь.....70

ДескоДрилль.....71

Дескопрент.....72

Орэндж Солвент.....73



## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция и очистка стоматологических отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам (слиютоотсосы) и плевательниц.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, легионеллы и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Перкарбонат натрия (30%), тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД), а также ПАВ, чистящие и пеногасящие компоненты, отдушка и другие добавки. Действующим веществом в рабочем растворе средства является надуксусная кислота (55-120 мг/г).



Артикул:

ПДО-05



Фасовка:

0,5 кг

В упаковке:

12 шт.

# ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЕСКОСАК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция отсасывающих систем;
- очистка и дезинфекция слюноотсосов;
- очистка и дезинфекция плевательниц.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Диалкилдиметиламмония хлорид (6,0%), функциональные компоненты.

Артикул: 00-814-020RU

00-814-050RU



Фасовка:

2 л

5 л

В упаковке:

6 шт.

3 шт.





# АМИНОСЕПТ® ДЕНТАЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция и очистка стоматологических материалов, в т.ч. оттисков, изделий для протезирования, зубопротезных заготовок, артикуляторов, слепочных ложек и пр.;
- дезинфекция (в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов из различных материалов ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа;
- дезинфекция стоматологических наконечников.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. ВБИ, ООИ, легионеллы и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин (0,75%), алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,5%), ПАВ, функциональные добавки, вода.



Артикул:

АСД-1

АСД-5



1 л



5 л

Фасовка:

В упаковке:

10 шт.

4 шт.



Dr. Schumacher

ГОТОВЫЙ РАСТВОР

## ДЕСКО ДРИЛЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, стоматологических боров и других вращающихся точных инструментов;
- дезинфекция зеркал с амальгамой.

### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

### СОСТАВ:

N,N-дидецил-N-метил-поли (оксиэтил) аммония пропионат (0,28%), кокопропилендиамин-1,5-бис-гуанидина ацетат (0,17%), вспомогательные и функциональные компоненты.

Артикул:

00-815-010RU

00-815-050RU



1 л



5 л

Фасовка:

В упаковке:

12 шт.

3 шт.





ГОТОВЫЙ РАСТВОР

# ДЕСКОПРЕНТ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и дезинфекция стоматологических изделий, оттисков, зубопротезных материалов.

## АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей ВБИ и туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон.

## СОСТАВ:

Алкилдиметилбензиламмония хлорид (0,48%), глутаровый альдегид (0,01%), глюксаль (0,2%), функциональные компоненты.

Артикул:

00-813-010RU

Фасовка:

1 л

В упаковке:

12 шт.



ГОТОВЫЙ РАСТВОР

# ОРЭНДЖ СОЛВЕНТ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка медицинских изделий, в т.ч. стоматологических, из различных материалов;
- удаление остатков альгината и цемента, а также пятен цинка-эвгенола;
- очистка от стоматологических паст перевязки и заготовок из гипса;
- удаление нежелательных наклеек и старых меток, а также остатков клея;
- удаление остатков йода и прочих цветных пятен.

## СОСТАВ:

Натуральное апельсиновое масло, децилолеат.

Артикул:

00-805-0025RU

Фасовка:

0,25 л

В упаковке:

9 шт.





**ООО «ДЕЗНЭТ»**

Россия, 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 60, стр. 1.

Тел.: +7 (495) 980-08-99,

+7 (495) 247-55-45

[www.deznet.ru](http://www.deznet.ru)

e-mail: [info@deznet.ru](mailto:info@deznet.ru).