

Инструкция по применению.

Mediflon - катетер внутривенный с инжекторным клапаном и фиксаторами.

Противопоказания:

- Изделие не должно применяться для пациентов с гиперчувствительностью к любому из материалов изделия.
- Введение высоковязких жидкостей.
- Переливание крови в больших объемах.

Внимание:

- Данное изделие должно применяться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
- Изделие должно применяться в соответствии с инструкцией.
- Производитель не несет ответственности за возможные последствия неправильного использования.
- Изделие не подлежит повторной обработке.
- Визуально оцените изделие и упаковку перед использованием.
- Ненадлежащие условия транспортировки и хранения могут вызвать структурные и/или функциональные повреждения изделия или упаковки.
- Изделие сохраняет гарантию нетоксичности, стерильности и апирогенности в случае целостности упаковки.
- Не мыть, не стерилизовать повторно. Утилизировать после использования.
- Данное изделие для однократного применения. Повторное применение может вызвать инфицирование или заражение.
- Избегать воздействия повышенной температуры и ультрафиолетового излучения на изделие.
- Изделие должно быть применено сразу после открытия упаковки.

REF

Номер по каталогу.

LOT

Код партии.



Дата изготовления.



Использовать до...



Не использовать при повреждении упаковки.

Mediflon - катетер внутривенный с инжекторным клапаном и фиксаторами.

Показания:

- Инфузия растворов, пригодных для вливания через периферические вены.
- Осуществление пролонгированных курсов внутривенной терапии хроническим больным.
- Струйное введение препаратов.
- Регидратация и/или корректировка дегидратации организма пациентам, которые не могут принимать жидкости в достаточном количестве орально. Восстановление и поддержание водно-солевого баланса организма.

Инструкция по применению.

- С осторожностью выберите и обработайте антисептическими средствами место будущей пункции.
- Подберите подходящий размер катетера и проверьте, чтобы целостность упаковки не была нарушена.
- Извлеките катетер из стерильной упаковки и снимите колпачок иглы.
- Заранее сформируйте гибкие фиксаторы в соответствии с анатомической необходимостью места прокола.
- Захватите катетер так, чтобы держать его одновременно за крышку инжекторного порта и фиксаторы.
- Выполните венозную пункцию. Успешность пункции контролируется по появлению крови в камере «обратного оттока крови».
- Зафиксируйте гибкие крылышки к коже при помощи адгезивного материала.
- Оставьте стальную иглу в просвете катетера для избежания кровотечения, а также для стабилизации катетера во время фиксации.
- Извлеките иглу полностью, одновременно придавливая вену в месте пункции.
- После извлечения иглы утилизируйте ее.

Запрещается повторное введение иглы в просвет катетера.

- Присоедините катетер к инфузионной системе.
- Прикройте место пункции стерильной повязкой.
- Лекарства могут вводиться помимо канюли через инжекторный порт. Для этого вставьте конус шприца в порт легким выкручивающим движением. После инъекции закройте защитный колпачок инжекторного порта.
- Поддерживайте регулярное наблюдение и уход за областью пункции в соответствии с установленными медицинскими нормами.

STERILE EO

Стерилизация оксидом этилена.



Запрет на повторное применение



Осторожно!

Обратитесь к инструкции по применению.



Изготовитель.



Не стерилизовать повторно.

PG



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 31 мая 2017 года № РЗН 2017/5804
ДУБЛИКАТ

На медицинское изделие

**Катетер внутривенный Mediflon с инжекторным клапаном и фиксаторами,
размером: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Глобал Медикит Лимитед", Индия,

Global Medikit Limited, 3, Dr. G.C. Narang Marg, Mall Road, Delhi-110007, India

Производитель

"Глобал Медикит Лимитед", Индия,

Global Medikit Limited, 3, Dr. G.C. Narang Marg, Mall Road, Delhi-110007, India

Место производства медицинского изделия

**Global Medikit Limited, Khasra No.323 (MI), Camp Road, Selaqui, Dehradun,
Uttarakhand-248197, India**

Номер регистрационного досье № РД-12337/42982 от 21.07.2016

Вид медицинского изделия **254610**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

приказом Росздравнадзора от 31 мая 2017 года № 5146
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

выдан приказом Росздравнадзора от 28 января 2020 года № 527
оригинал регистрационного удостоверения признается недействующим.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Дубликат выдан 28 января 2020 года

Д.Ю. Павлюков

0044835